

## ポルジェ 泌尿器用カテーテル (尿管用カテーテル)


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 使用方法  
再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

- 尿管カテーテル(JMDN 34926012)  
材質：ポリ塩化ビニル  
可塑剤：フタル酸ジ 2-エチルヘキシル

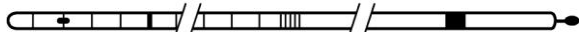

- \*\*・スタイレット  
金属またはポリエステル

- コネクタ  
材質：ポリ塩化ビニル  
可塑剤：フタル酸ジ 2-エチルヘキシル

#### <尿管カテーテルの先端形状>

##### ドレナージ用カテーテル：


ストレートラウンド



ストレートホイッスル



ストレートオリーブ

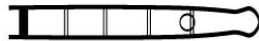


##### 逆行性腎盂尿管造影用カテーテル：

オーバルバルブ



コーン

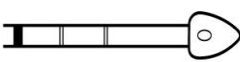

ブラッシー



#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- カテーテルの挿入は医師が行ってください。
- カテーテルが正しく機能しているか、特に尿の排出が保たれているかどうか、定期的な監視を行なってください。
- 造影剤を使用する場合は、使用する薬剤の添付文書等の指示に従ってください。
- 造影剤を使用する場合は、カテーテルの閉塞を避ける為、以下の注意事項を守ってください：
  - 生理食塩水で造影剤を50%に薄めてください。
  - 注入はすばやく行なってください。
  - ガイドワイヤを使用する場合は、腎盂、尿管を傷つけないよう、無理をせずに尿路に挿入してください。
- 滅菌包装が破損、開封されている場合は使用しないでください。
- 再滅菌して使用しないでください。
- 使用後はすみやかに廃棄してください。

##### 2. 不具合・有害事象

###### 1) 有害事象

- 尿管ドレナージ用カテーテルを留置する場合、他の尿道カテーテル法の場合と同様に、尿路感染等が生じることがあります。こうした合併症が生じていないかどうかの監視を行ってください。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管方法  
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保存してください。
- 使用の期限  
直接の包装及び外箱を参照してください(自己認証による)。

#### 【包装】

5本/箱又は10本/箱

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：コロプラスト株式会社

住所：〒102-0074 東京都千代田区九段南  
2-1-30 イタリア文化会館ビル

電話：03-3514-4141 (代)

製造国名：フランス

\*製造業者名：Coloplast Manufacturing France S.A.S.  
コロプラスト マニュファクチュリング  
フランス エス.エー.エス.

#### 【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済製品であり、そのまま直ちに使用できます。

#### 【操作方法又は使用方法等】

- 適切なサイズのカテーテルを選んでください。
- カテーテルを留置する前に、スタイレットがカテーテル内で正しく動くことを確認してください。またスタイレットがカテーテル先端に対して正しく置かれ、側孔より突き出していないことを確認してください。
- 内視鏡下でカテーテルを挿入します。通常の手順に従ってカテーテルを挿入してください。
- カテーテルが正しい位置に置かれたことを確かめたから、スタイレットを取り出してください。
- 尿の排出を確認してください。
- カテーテル留置位置の確認は、直視およびX線透視下で行なってください。
- カテーテルの目盛は測定用ではなく、位置設定の目安とするものです。
- カテーテルは、軽く引き抜くことで抜去できます。

PORGES



Coloplast