



JLMDILPID033



2007年10月1日作成 (第1版)

コード番号 A2N3399

Baxter

機械器具 74. 医薬品注入器
自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
(輸血・カテーテル用ストップコック)

管理医療機器	
承認番号	20400BZY00131000
JMDNコード	70371000

インターリンクI.V.アクセスシステム (インジェクションサイト)

再使用禁止

【警告】


中心静脈カテーテル、動脈カテーテルやその他の重要な箇所(偶発的な接続外れを起こした場合、重篤な症状もしくは死亡をまねく箇所)に使用されるラインと接続する場合は、ルアースリップアダプターを使用しないこと。[偶発的な接続外れが起こった場合、失血、空気塞栓などの合併症あるいは重要な治療の中断により、重篤な症状さらには死亡にいたる恐れがある為。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は滅菌済みであり、発熱性物質は含まれていません。
- ・インジェクションサイトは、他のインジェクションサイトと区別するために、周囲が色分けされています。
- ・本品は天然ゴムを使用していません。

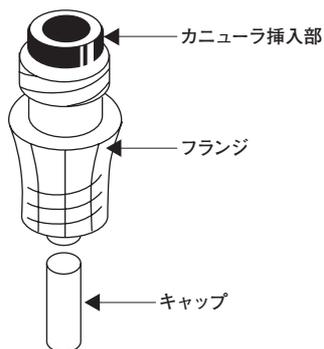

製品番号	製品名
A2N3399	インジェクションサイト

【使用目的】

動静脈路への薬液注入及び血液採取

【操作方法又は使用方法等】

<操作開始に際する注意>

1. 使用前に包装が開封されていたり、破損がある場合は使用しないでください。
2. 使用前に本品に傷、割れ等使用上障害となるような問題がないことを確認してください。
3. 無菌的に操作してください。

1. キャップを外して、本品をカテーテル留置針につなぎます。
2. フランジ部分を持ち、本品を固定します。
3. カニューラ挿入部のゴム部を消毒剤で拭きます。


注意：穿刺前には、インジェクションサイトのカニューラ挿入部のゴム部を、消毒綿等で、必ず消毒してください。消毒方法は、カニューラ挿入部のゴム部を一方に消毒してください。

4. シリンジに取り付けたインターリンク カニューラ*を、カニューラ挿入部のゴム部の中心スリットに挿入します。

<使用方法に関連する使用上の注意>

1. インジェクションサイトから薬剤を注入する場合には、インターリンク カニューラ*を使用してください。インターリンク カニューラ*の使用方法は、インターリンク カニューラ*の添付文書をご参照ください。
2. 薬液、輸液、血液製剤投与後、又採血後のフラッシュは、フラッシュ効率を上げる為に、下記の手順に従って確実に行ってください(図参照)。
 - ①カニューラの先端を回しながら、②フラッシュ溶液を注入し、③注入を維持したままカニューラを垂直に引き抜いてください。

(確実なフラッシュが行われないと、血液の滞留による感染助長のリスク、薬液の化学反応の影響による薬効への影響、カテーテル閉塞、フィルターの目詰まりの可能性が高まる)

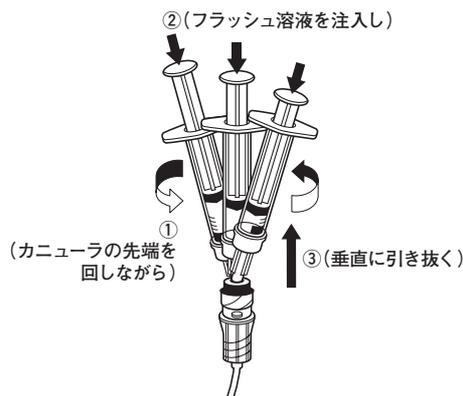

3. インターリンク カニューラ*がインジェクションサイトに接続されている場合は、カニューラと接続している輸液セットやシリンジ、その他の器具等を外さないでください。
 4. 金属針を用いる必要がある場合は、ゲージの細かい針を用い、カニューラ挿入部のゴム部のスリット部外側に挿入してください。
 5. 中心静脈カテーテル、動脈カテーテルやその他の重要な箇所（偶発的な接続外れを起こした場合、重篤な症状もしくは死亡をまねく箇所）に使用されるラインと接続する場合は、ルアースリップアダプターを使用しないでください。
 6. インターリンク カニューラ* ネジ式またはレバー式ロックを用いれば、輸液セットとの確実な接続もできます。
 - ・ 本品の交換は、CDC（米国疾病管理センター）の血管内留置カテーテル関連感染予防のためのガイドラインに従って行ってください。
- ※ インターリンク カニューラは、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社の製品です。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ 医薬品の添付文書を確認後、使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で室温にて保管してください。

2. 使用期限

5年間（自己認証による）

【包装】

製品番号	包装単位	
	製品	臨床試用医療機器
A2N3399	200個入	20個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

バクスター株式会社

〒104-6009 東京都中央区晴海一丁目8番10号

連絡先：03 (6204) 3900（夜間・休日伝言承り電話）

製造業者：バクスターヘルスケア社、シンガポール工場（シンガポール）

Baxter Healthcare S.A., Singapore Branch (Republic of Singapore)

BAXTER及びインターリンクはバクスター・インターナショナル・インクの登録商標です

製造販売元

バクスター株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番10号

JLMDIL-PID033