

サクションカテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】  
 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

\*〈形状・構造〉  
 100/375 直型サクションカテーテル



カテーテル本体とコントロール弁で構成される。カテーテル本体の先端はまっすぐである。  
 カテーテル先端部及び表面は滑らかに仕上げられていて、気管内チューブ及び気管切開チューブの腔にスムーズに挿管できる。  
 カテーテル先端部の側面に2個の楕円形横孔が開孔している。  
 コントロール弁は気管分泌物を吸引する際、指先の微妙な調整で吸引力を調節するための指先弁である。コントロール弁の接続口はテーパ型マウントである。

〈原材料〉

| 名 称     | 原 材 料   |
|---------|---------|
| カテーテル本体 | ポリ塩化ビニル |

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ－2－エチルヘキシル）を使用しています。

〈滅菌方法〉

- ・5、6Fr 放射線滅菌
- ・上記サイズ以外 エチレンオキサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉  
 気管分泌物の吸引除去

【使用方法等】

1. 気管内チューブ又は気管切開チューブの大きさに合わせて、適切なサイズを選択します。
2. 本品を吸引管に接続し、適切な吸引圧に設定します。
3. 吸引を止めたまま、本品を気管に挿入し、適切な深さまで挿入します。
4. コントロール弁を指で塞いで吸引します。尚、吸引圧はコントロール弁の開閉度合いで調節します。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- 2) 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ－2－エチルヘキシルが溶出する恐れがあるので注意すること。
- 3) 本品に吸引圧をかけた状態で、気管内に挿入しないこと。
- 4) 気管内チューブ及び気管切開チューブに挿入して使用する場合、チューブの内径の1/2以下のサイズにすること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉  
 本品を保管するときは、次の事項に注意すること。  
 ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保存すること。  
 ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。  
 ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。  
 〈有効期間〉  
 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*〈製造販売業者〉  
**smiths medical**  
 スミスメディカル・ジャパン株式会社  
<http://www.smiths-medical.com/jp/>  
 \*\*〈問合せ先〉  
 フリーダイヤル 0120-582-855  
 \*〈製造業者〉  
 スミス メディカル インターナショナル Ltd.  
 Smiths Medical International Ltd.  
 \*〈国名〉  
 英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

| シンボル | 定 義                 |
|------|---------------------|
|      | 再使用禁止               |
|      | 注意                  |
|      | エチレンオキサイドガス滅菌済      |
|      | 放射線滅菌済              |
|      | ロット番号               |
|      | 製造年月                |
|      | 有効期間                |
|      | 品番                  |
|      | 天然ゴムラテックスは使用していません  |
|      | 可塑剤としてDEHPを使用しています  |
|      | 高温および直射日光を避けて保管すること |
|      | 多湿および水濡れを避けて保管すること  |
|      | 包装破損時使用不可           |
|      | 数量                  |