

** 2009年9月17日改訂 (第3版)
* 2005年12月21日改訂

製造販売届出番号 20B1X00005000017

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

八光アダプター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

** 本品は、輸液セット等のコネクタ部分と嵌合が可能な形状を有するため、キャップ、接続アダプタ等で使用が可能となる。

** <構造図(代表図)>

アダプタ


メスメスアダプター



オスメスアダプター




オスオスアダプター

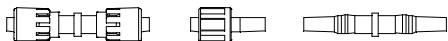


キャップ

メス用

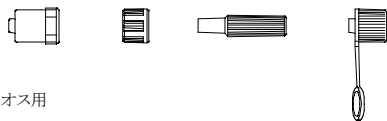

オス用

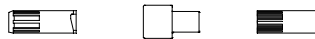

** 材質は、ポリプロピレン製又は、ポリアセタール製。

【使用目的、効能又は効果】

** 輸液セットなどに用いるアクセサリセットをいう。キャップ類、コネクタ類、アダプタ類等から成る。

【操作方法又は使用方法等】

** 本品は滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。
1) 包装から取り出し、輸液セット等に接続する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ** 包装から取り出す際や接続する際には、特に接続部への汚染に注意すること。
・接続は確実にを行い、使用中は緩みがないことを定期的に確認すること。
・テーパ部に薬液を付着させないこと。
[嵌合部に緩み等が生じる可能性がある。]
- ** 併用する医療機器の使用法については、その添付文書を確認後、使用すること。
- ** 嵌合させる際は過度な締め付けをしないこと。
[コネクタが外れなくなる又は、コネクタが破損する可能性がある]
- ** 本品に衝撃を与えないこと
[破損する可能性がある]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装が破損、汚損している場合や、製品に異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・使用直前に開封して使用すること。
- ** 材質がポリプロピレンの場合、低温下では衝撃等で破損する可能性があるため、取り扱いに注意すること。
[本体は、ポリプロピレンを使用しており、低温下では耐衝撃強度が低下し、破損する恐れがあるため。]
- ** 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。
[破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]
- ** 本品は、異物混入を防止するものであり、無菌性を保持する目的では使用しないこと。

<その他の注意>

- ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
- ・本品はエチレンオキシドガス滅菌済み。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

- ・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

<有効期間・使用の期限>

- ・箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

【包装】

100個/1箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

** <製造販売業者>

株式会社八光
長野県千曲市太字磯部1490番地
TEL.026-275-0121

** <製造業者>

株式会社八光

販売窓口：東京都文京区本郷三丁目42-6
TEL 03-5804-8500