

機械器具 61 歯科用ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器 ストレート・ギアードアングルハンドピース JMDN:70692000

マイクロメガ ハンドピース

【禁忌・禁止】*

マイクロモーターの回転中に、バーやファイル及びハンドピースの着脱操作を行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

（種類）

等速ストレートハンドピース（型番：47IS）
等速ストレートハンドピース（型番：47E）
等速ストレートハンドピース（型番：57E2）
等速ストレートハンドピース（型番：49IS）
等速ストレートハンドピース（型番：KM17E）
等速コントラアングルハンドピース（型番：40EY）
等速コントラアングルハンドピース（型番：40XEP）
5 分の 1 減速コントラアングルハンドピース（型番：10EY）
5 分の 1 減速コントラアングルハンドピース（型番：10XEP）
5 分の 1 減速コントラアングルハンドピース（型番：KM10E）
3 倍増速コントラアングルハンドピース（型番：2000E）
3 倍増速コントラアングルハンドピース（型番：120E）
3 倍増速コントラアングルハンドピース（型番：140XE）

オプション製品

内部注水タイプハンドピース
40E、40XE、10E、10XE、120XEI、140XEI、2000EI

【使用目的、効能又は効果】

歯や顎骨の切削、修復物の切削、研磨の目的で使用する。

【品目仕様等】

回転数が 4,000～40,000r.p.m. のマイクロモーターに取り付けた場合の回転数は下記の通り。

種 類	型 番	回転数 (r.p.m.)
外部注水 ストレートハンドピース	47E	4,000～40,000
	57E2	4,000～40,000
内部注水 ストレートハンドピース	47IS	4,000～40,000
	57E	4,000～40,000
	49IS	4,000～40,000
内部注水・外部注水兼用 ハンドピース	KM10E	800～8,000
	KM17E	800～8,000
外部注水コントラアングル ハンドピース	40EY	4,000～40,000
	40XEP	4,000～40,000
	10EY	800～8,000
	10XEP	800～8,000
	120E	12,000～120,000
	140XE	12,000～120,000
内部注水コントラアングル ハンドピース	2000E	12,000～120,000
	40E	4,000～40,000
	40XE	4,000～40,000
	10E	800～8,000
	10XE	800～8,000
	120EI	12,000～120,000
	2000EI	12,000～120,000

【操作方法又は使用方法等】*

ヘッド部にバーやファイルを装着し、マイクロモーター等に接続して使用する。

【使用上の注意】

- ① 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ② 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③ 最高回転数が 40,000r.p.m. 以下の、カップリングが JIS T 5904 に適合したマイクロモーターに接続して使用すること。*
- ④ バーやファイルを装着した時は、確実に固定されていることを確認すること。確実に固定されていないと、回転中に抜けて口腔内に飛び出し、事故につながる恐れがある。
- ⑤ ハンドピースをマイクロモーターへ装着する時は、ハンドピースをまっすぐにカチッと音がするまでマイクロモーターに押し込むこと。
- ⑥ ハンドピースの取り外しは、マイクロモーターよりまっすぐに軸方向に引き出し、取り外すこと。
- ⑦ 曲がっていたりバランスの狂っているバーやファイルを使用しないこと。
- ⑧ バー等を装着せずにハンドピースを駆動させないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】*

（保管方法）

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（耐用期間）

正規の保守点検を行なった場合に限り、8 年間とする。

（耐用期間は自己認証[当社データ]による。）

【保守・点検に係わる事項】

使用者が行う日常の手入れ

1. 洗浄

- ① 外部を小器具用防錆洗浄液を含ませた布で清掃する。
- ② 清掃後、流水で洗浄液を洗い流してから乾燥させる。
- ③ ハンドピースの後ろ側からマイクロモーターハンドピース用スプレーのアダプターを挿入し、注油する。ハンドピースヘッドからきれいなオイルが出てくるまで数回続けること。
- ④ 注油後、ハンドピースを数秒間回転させ、外部にしみ出た余分なオイルを拭き取る。

（血液等がヘッド内部に滲入している場合）

使用后、血液、体液等が乾燥しないうちに直ちにハンドピースを分解して洗浄する。

- ① ヘッド部を時計方向に少し回し、シャンクから引き抜き、ドライブシャフトを取り外す。
- ② 分解したヘッド、ドライブシャフト、シャンクを小器具用防錆洗浄液で内部まで洗浄する。
- ③ 流水で洗浄液を洗い流し、乾燥させる。

- ④元のように組み立て、マイクロモーターハンドピース用スプレー等で注油する。
- ⑤注油後、ハンドピースを数秒間回転させ、外部に滲み出た余分なオイルを拭き取る。

2. 滅菌

高圧蒸気滅菌（135℃で 20 分間、乾燥工程はなし）を行う。

- ・ハンドピースは滅菌バックに入れて滅菌すること。
- ・滅菌後、注油する。

業者による保守点検事項 *

本品には、業者に定期的に依頼をしなければならない保守はない。

【包装】 *

1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：マイクロメガ社
MICRO-MEGA SA（国名：フランス）