

器51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 輸血・カテーテル用アクセサリセット 70326002

プラネクタ

再使用禁止


(PNロック)

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造等】

<構成(代表例)>

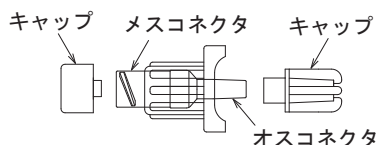

- ・上記製品と当該製品の構成が異なる場合がある。

【性能、使用目的、効能又は効果】

輸液セット等のラインの途中又は薬液ボトルに接続し、薬液の混注口、採血口又は採液口として使用する。

なお、本品は薬液の混注口又は採血口として使用するプラネクタに接続する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装から本品を取出します。
2. 本品のメスコネクタを輸液セット等のオスコネクタと外れないようにしっかりと接続します。
3. 本品のオスコネクタ先端まで薬液を満たします。
4. 接続するプラネクタの混注口及びキャップ部を消毒用アルコール綿等で消毒します。
5. 本品のルアー一部をプラネクタの混注口にまっすぐ押し込みます。押し込んだ状態で右に回転させ、プラネクタの突起（ツメ）と接続します。接続できた場合は、カチッと音がします。

使用方法に関連する使用上の注意

- 本品をプラネクタ等に接続する場合は、本品がプラネクタのツメに確実に装着（ロック）されていることを確認すること。〔装着が不十分な場合、外れ、液漏れ及びエア混入が生じる。〕
- 輸液セット等を接続する際は、外れないように確実に行うこと。なお、過度な締め付けをしないこと。〔接続部が外れない、接続部が破損する可能性がある。〕
- 接続部に薬液が付着した状態で接続した場合は、接続部に緩みが生じるので注意すること。
- 本品は、プラネクタ専用の接続パーツであるので、プラネクタ以外と接続しないこと。〔外れ、液漏れ及びエア混入の可能性がある。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 医薬品の添付文書を確認後、使用すること。
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 開封時は接続部の外れや緩みがないことを確認してから使用すること。

- 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。

2. その他の注意

- コネクタの先端部には直接手を触れないこと。
- 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

2. 使用期限

- 使用期限は、箱の使用期限欄を参照すること。〔自己認証（当社データ）により設定〕

【包装】

50個入／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元及び製造元

株式会社ジェイ・エム・エス

広島市中区加古町12番17号

郵便番号：730-8652

電話番号：082-243-5806