

****特定保守管理医療機器**

ダッシュ

再使用禁止


(鼻用カニューレ(O₂吸入/CO₂測定))

【禁忌・禁止】

- (1) 本製品はディスプレイ製品のため再使用は行わないこと。
- (2) 呼吸流量が 50ml/分の吸引に耐えられない患者には使用しないこと。[重大な事故の原因となることあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状

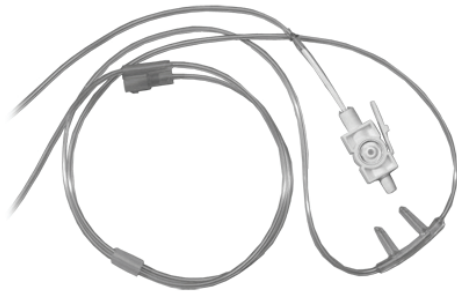

カタログ番号	仕様
2013066-001	鼻用、成人用
2013066-002	鼻用、小児用
2013066-003	鼻用、幼児用
2013066-004	鼻用、成人用、酸素吸入管付
2013066-005	鼻用、小児用、酸素吸入管付
2013067-001	口鼻用、成人用
2013067-002	口鼻用、小児用
2013067-003	口鼻用、成人用、酸素吸入管付
2013067-004	口鼻用、小児用、酸素吸入管付
2013068-001	エアアダプタ、小児・成人用
2013068-003	エアアダプタ、小児・成人用、除湿付
2013069-001	サンプルライン
2013069-002	サンプルライン、除湿付

【使用目的、効能又は効果】

使用目的(ダッシュ本体)

本製品は組み込まれたモジュール、他の装置を利用していくつかのモニタリングパラメータを収集しベッドや患者別に表示するユニットであり、成人、小児、新生児の生体情報を長時間、かつ同時に監視することを目的とする患者モニタリング装置である。

【品目仕様等】

- ・患者装着部： 塩化ビニール： 70%
可塑剤、安定剤： 30%
(天然ゴム不使用)
- ・モジュール接続部： 差込型コネクタ

【操作方法又は使用方法等】


診療所、病院において、非挿管患者に対して低濃度の酸素を吸入、及び二酸化炭素(呼気ガス)の収集をする鼻用CO₂カニューレである。
製品を使用するにあたり、本製品を接続して使用する装置等に付属されている取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

使用環境条件(標準環境)

- 周囲温度： 0~40℃
- 相対湿度： 30~85%(結露なきこと)

使用方法

1. 鼻用CO₂カニューレをモジュールに取り付けるには鼻用CO₂カニューレのモジュール接続部をモジュールの接続口に合わせてしっかり差し込むこと。
2. 鼻用CO₂カニューレの患者装着部を患者の鼻に装着しチューブが外れないようにスリーブで長さを調整すること。
3. 患者から鼻用CO₂カニューレを取り外すには鼻用CO₂カニューレのスリーブを緩めてから取り外すこと。

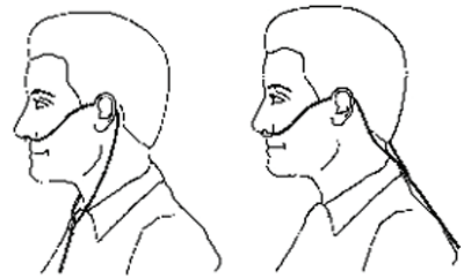

《鼻用CO₂カニューレ装着方法》

【使用上の注意】

警告

1. 本製品を使用するにあたりチューブに過度のテンションをかけないこと。
[重大な事故の原因となることあるため]
2. 一人の患者にのみ使用すること。
[感染症の原因となることあるため]

重要な基本的注意

1. 医家向け医療機器であるため、医師による使用及び医師の指示によって使用すること。
2. 鼻用CO₂カニューレは定められた場所に装着すること。
(使用方法の1~3を参照のこと)
3. 本製品は皮膚障害のある部位には装着しないこと。
[皮膚障害の悪化、感染等の恐れがあるため]
4. 当社指定以外の装置に使用しないこと。
[当社指定以外の装置と接続し、その装置に起因する故障が発生した場合には責任を負いかねるため]
5. 長時間使用する場合には少なくとも 8 時間毎に、鼻用CO₂カニューレを取り外し鼻や口の状況を確認すること。
[長時間の使用により粘膜が乾燥し気道の抵抗感による痛みが発生するおそれがあるため]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

1. 保管条件
周囲温度： -40~70℃
相対湿度： 10~95%(結露なきこと)
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること
(3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等が無いか目視点検を行うこと。
2. 全てのコネクタが安全にセットされているかチェックすること。
3. 滅菌処理は行わないこと。

【包装】

10本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

**お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： ジーイー メディカル システムズ
インフォメーションテクノロジーズ
(GE Medical Systems Information Technologies)

国名： アメリカ合衆国

社内部品番号： 5404165