

器49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

## ワンタッチ針

再使用禁止


### 【警告】

- ①本品を使用後は保護キャップをした上で、感染防止に配慮して医師に指定された場所に処分すること。
- ②感染予防のため、採血部位の消毒を行うこと。

### 【禁忌・禁止】

- ①再使用禁止。
- ②外観を確認し、保護キャップが外れていたり、破損している場合は使用しないこと。
- ③小児の手の届かないところへ保管すること。
- ④本品は使用期限内のものを使用すること。

【形状・構造及び原理等】

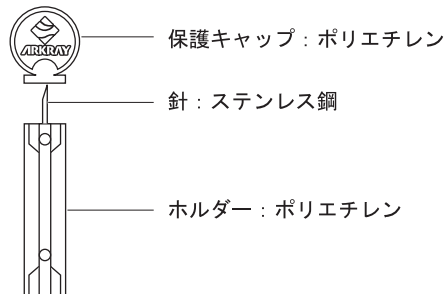

【使用目的】

本品は血糖値測定、血液型判定等のための微量採血を目的とする医療機器である。放射線照射滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

【操作方法又は使用方法等】

- ①本品を穿刺器具「ワンタッチウルトラソフト™(許可番号:13B1X00204)」に奥までしっかりと装着する。
- ②保護キャップをねじってホルダーから切り離してから採血する。
- ③本品を使用した後は、針に保護キャップをつけて廃棄する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ①併用する「ワンタッチウルトラソフト™(許可番号:13B1X00204)」(別売)の添付文書も併せて参照すること。
- ②保護キャップを外したらすぐに使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法: 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管すること。  
使用期限: 製品の包装に記載[自己認証(当社データ)による]

【包装】

25本入、30本入、50本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**  
〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子1480

製造元 **株式会社 アークレイ ファクトリー**

発売元 **アークレイ株式会社**  
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町57

販売元 **ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社**  
〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号

<お問い合わせ先>

ワンタッチ コールセンター

TEL 0120-113-903

(24時間365日対応 携帯電話・PHSからでもかけられます)