



**2013年4月1日（第4版）
*2010年10月1日（第3版）

承認番号 21700BZY00320000

機械機器 6 呼吸補助器
管理医療機器 麻酔回路セット 70567000

PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

【警告】

〈使用方法〉

- ・医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが本品を使用すること。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

〈使用方法〉

- ・吸入ガスを本品のポートへ流さないこと [呼気ガスサンプリングのためのポートであるため]。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉


225-3507-800 クリアーエルボ



225-3523-804 ガスサンプリングエルボ



225-3524-804 ガスサンプリングストレート

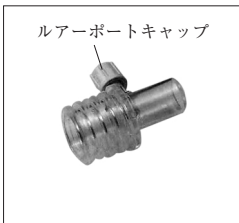

患者側：外径22mm、内径15mm
蛇管側：外径15mm

- ・未滅菌

【使用目的、効能又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

【品目仕様等】

接続部	患者側接続部の内外径はJIS T 7201-21：1999に適合する15mm雄円すい又は22mm雌円すいコネクタに接続可能
-----	---

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品をビニール袋から取り出してください。
2. 蛇管側のコネクタ内径15mmに、本品外径15mmを接続してください。
3. マスクの場合、本品患者側コネクタ外径22mmに接続してください。
4. 気管内チューブ、気管切開チューブの場合、本品患者側コネクタ内径15mmに接続してください。
5. 呼気ガスモニタを使用する場合は、本品のルアーポートキャップを外し、ポートにサンプリングチューブを接続してください。
6. 呼気ガスモニタを使用しない場合は、ルアーポートキャップを取り付けてください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品に損傷又は異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が附着していないことを確認すること。
- ・ルアーポートが確実に閉まっていることを確認すること。
- ・本品にオートクレーブ滅菌、乾熱滅菌等、材質に影響を及ぼす滅菌消毒はしないこと [緩みや破損等を生じる恐れがあるため]。

〈その他の注意〉

- ・院内の感染防止の指針に従うこと。
- ・本品使用後は、関係法令を遵守し、適切に廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間・使用の期限〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【包装】

10個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

**〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

**〈問合せ先〉

TEL (03) 3405-9300

〈製造業者〉

スミスヘルスケア マニュファクチャリング S.A. de C.V.

Smiths Healthcare Manufacturing S.A. de C.V.

〈国名〉

メキシコ

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	再使用禁止
	添付文書を参照すること
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量