

# PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

225-3507-800 クリアーエルボ



225-3523-804 ガスサンプリングエルボ



225-3524-804 ガスサンプリングストレート



患者側：外径22mm、内径15mm  
蛇管側：外径15mm

・未滅菌

### 【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

### 【使用方法等】

1. 本品をビニール袋から取り出してください。
2. 蛇管側のコネクタ内径15mmに、本品外径15mmを接続してください。
3. マスクの場合、本品患者側コネクタ外径22mmに接続してください。
4. 気管内チューブ、気管切開チューブの場合、本品患者側コネクタ内径15mmに接続してください。
5. 呼気ガスモニタを使用する場合は、本品のルアーポートキャップを外し、ポートにサンプリングチューブを接続してください。
6. 呼気ガスモニタを使用しない場合は、ルアーポートキャップを取り付けてください。

### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) ルアーポートが確実に閉まっていることを確認すること。
- 2) 吸入ガスを本品のポートへ流さないこと [呼気ガスサンプリングのためのポートであるため]。

### 【保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時(運搬時も含む)は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間・使用の期限〉

・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証(当社データ)による]。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*\*〈製造販売業者〉

**smiths medical**

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

\*\*〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

| シンボル | 定 義                 |
|------|---------------------|
|      | 再使用禁止               |
|      | 注意                  |
|      | 未滅菌                 |
|      | ロット番号               |
|      | 製造年月                |
|      | 有効期間                |
|      | 品番                  |
|      | 天然ゴムラテックスは使用していません  |
|      | 高温および直射日光を避けて保管すること |
|      | 多湿および水濡れを避けて保管すること  |
|      | 包装破損時使用不可           |
|      | 数量                  |