

## PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

225-3507-800 クリアーエルボ



225-3523-804 ガスサンプリングエルボ

ルアーポートキャップ



225-3524-804 ガスサンプリングストレート

ルアーポートキャップ



患者側：外径22mm、内径15mm

蛇管側：外径15mm

・未滅菌

### 【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

### 【使用方法等】

1. 本品をビニール袋から取り出してください。
2. 蛇管側のコネクタ内径15mmに、本品外径15mmを接続してください。
3. マスクの場合、本品患者側コネクタ外径22mmに接続してください。
4. 気管内チューブ、気管切開チューブの場合、本品患者側コネクタ内径15mmに接続してください。
5. 呼気ガスモニタを使用する場合は、本品のルアーポートキャップを外し、ポートにサンプリングチューブを接続してください。
6. 呼気ガスモニタを使用しない場合は、ルアーポートキャップを取り付けてください。

### 【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※（製造販売業者）

**smiths medical**

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<https://www.smiths-medical.com/ja-jp>

※（問合せ先）

フリーダイヤル 0120-582-855

※（製造業者）

スミス メディカル ASD, Inc.

Smiths Medical ASD, Inc.

※（国名）

アメリカ合衆国