

PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

- 670001 ノンラテックス麻酔バッグ 1L
- 670002 ノンラテックス麻酔バッグ 2L
- 670003 ノンラテックス麻酔バッグ 3L
- 670012 ノンラテックス麻酔バッグ 0.5L



接続口 I.D. (内径) 22mm

〈原材料〉 合成ゴム (クロロプレン)

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

【使用方法等】

麻酔器の取扱説明書に従って、本器を麻酔器に接続してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品に損傷又は異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないことを確認すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

- ・バックの破損、リーク
- ・ソケットの変形、破損

〈その他の注意〉

- 1) 本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留する恐れがあるため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

** (製造販売業者)

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

** (問合せ先)

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定義
	再使用禁止
	注意
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量