



I O A J I 0 3 7 G

\*\*2013年4月1日 (第7版)

\*2012年5月15日 (第6版)

承認番号 21700BZY00320000

機械器具 6 呼吸補助器  
管理医療機器 麻酔回路セット 70567000

## PORTEX・麻酔回路セット

再使用禁止

## 【警告】

〈使用方法〉

・医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが本品を使用すること。

## 【禁忌・禁止】

・再使用禁止

〈使用方法〉

・本品は可燃性麻酔薬の存在下で使用しないこと [本品は非導電性であり、爆発の危険性があるため]。

・本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留する恐れがあるため]。

〈併用医療機器〉

・本品と人工鼻、人工鼻フィルタを接続する場合は、ネブライザ又は加温加湿器を併用しないこと [人工鼻、人工鼻フィルタ及びフィルタが目詰まり等を起こし、患者が呼吸困難となる恐れがあるため]。

\* \* \* フィルタとネブライザを併用しないこと [併用するとフィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難を起こすことがあるため]。

## 【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

麻酔回路一人用

品番	品名
C37041303J	麻酔回路 成人用 102cm スイベル
C37101304J	麻酔回路 成人用 102cm レギュラエルボ
C37091305J	麻酔回路 成人用 102cm レギュラエルボ フィルタ
C37101306J	麻酔回路 成人用 102cm ガスサンプリングエルボ
C37101307J	麻酔回路 成人用 152cm レギュラエルボ
C37101308J	麻酔回路 成人用 183cm ガスサンプリングエルボ
C37041322-	麻酔回路 成人用 102cm スイベル 3Lノンラテックス NLJ 麻酔バッグ
C37101324-	麻酔回路 成人用 102cm レギュラエルボ 3Lノンラ NLJ テックス麻酔バッグ
C37101365-	麻酔回路 成人用 102cm レギュラエルボ 2Lノンラ NLJ テックス麻酔バッグ
C37091326-	麻酔回路 成人用 102cm レギュラエルボ フィルタ NLJ 3Lノンラテックス麻酔バッグ
C37101327-	麻酔回路 成人用 102cm ガスサンプリングエルボ NLJ 3Lノンラテックス麻酔バッグ
C37101329-	麻酔回路 成人用 152cm レギュラエルボ 3Lノンラ NLJ テックス麻酔バッグ
C37101368-	麻酔回路 成人用 152cm レギュラエルボ 2Lノンラ NLJ テックス麻酔バッグ
C37101330-	麻酔回路 成人用 183cm ガスサンプリングエルボ NLJ 3Lノンラテックス麻酔バッグ

麻酔回路一小児用

品番	品名
C37291309J	麻酔回路 小児用 91cm レギュラエルボ
C37291311J	麻酔回路 小児用 91cm ガスサンプリングエルボ
C37291332-	麻酔回路 小児用 91cm レギュラエルボ 1Lノンラ NLJ テックス麻酔バッグ
C37201333-	麻酔回路 小児用 91cm レギュラエルボ フィルタ NLJ 1Lノンラテックス麻酔バッグ
C37291334-	麻酔回路 小児用 91cm ガスサンプリングエルボ NLJ 1Lノンラテックス麻酔バッグ


RX麻酔回路一人用

品番	品名
C4710763J	RX回路 成人用 41~102cm レギュラエルボ
C47101313J	RX回路 成人用 41~102cm ガスサンプリングエルボ
C45101314J	RX回路 成人用 84~221cm レギュラエルボ
C45091315J	RX回路 成人用 84~221cm レギュラエルボ フィルタ
C45101316J	RX回路 成人用 84~221cm ガスサンプリングエルボ
C45041317J	RX回路 成人用 84~221cm スイベル
C45041318J	RX回路 成人用 84~221cm スイベルポート付
C47101336-	RX回路 成人用 41~102cm レギュラエルボ 3Lノン NLJ ラテックス麻酔バッグ
C47101338-	RX回路 成人用 41~102cm ガスサンプリングエルボ NLJ 3Lノンラテックス麻酔バッグ
C45101340-	RX回路 成人用 84~221cm レギュラエルボ 3Lノン NLJ ラテックス麻酔バッグ
C45091342-	RX回路 成人用 84~221cm レギュラエルボ フィルタ NLJ 3Lノンラテックス麻酔バッグ
C45101344-	RX回路 成人用 84~221cm ガスサンプリングエルボ NLJ 3Lノンラテックス麻酔バッグ
C45041345-	RX回路 成人用 84~221cm スイベル 3Lノンラテッ NLJ クス麻酔バッグ
C45041347-	RX回路 成人用 84~221cm スイベル・ポート付 3L NLJ ノンラテックス麻酔バッグ


RX麻酔回路一小児用

品番	品名
C48101319J	RX回路 小児用 51~127cm レギュラエルボ
C49101320J	RX回路 小児用 102~254cm レギュラエルボ
C48291348-	RX回路 小児用 51~127cm レギュラエルボ 1Lノン NLJ ラテックス麻酔バッグ
C49291349-	RX回路 小児用 102~254cm レギュラエルボ 1Lノン NLJ ラテックス麻酔バッグ

患者コネクタ (レギュラエルボ/ガスサンプリングエルボ)

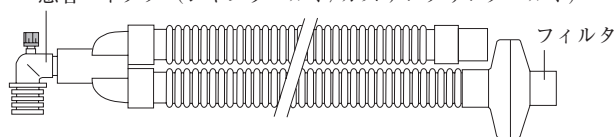

麻酔回路 成人用/小児用

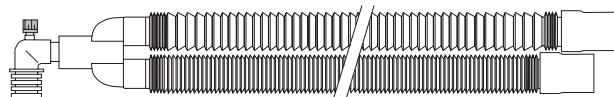

RX麻酔回路 成人用/小児用



麻酔バッグ

蛇管には標準のもの (麻酔回路 成人用/小児用) と伸縮性のもの (RX麻酔回路 成人用/小児用) がある。麻酔バッグやフィルタの有無、患者コネクタのタイプにより複数種類のセットがある。

## 〈原材料〉

名 称		原 材 料
フィルタ	メディア	ポリプロピレン
麻酔バッグ	ノンラテックス	クロロプレン

・未滅菌

## 【使用目的、効能又は効果】

### 〈使用目的〉

本品は、麻酔器に接続して使用する麻酔用呼吸回路セットである。

## 【品目仕様等】

接続部	患者コネクタの患者側接続部の内外径はJIS T 7201-2-1：1999に適合する15mm雄円すい又は22mm雌円すいコネクタに接続可能
接続部	蛇管の機器側接続部の内径はJIS T 7201-2-1：1999に適合する22mm雄円すいコネクタに接続可能
接合部	フィルタの機器側接合部の内径はJIS T 7201-2-1：1999に適合する22mm雄円すいコネクタに接続可能
漏れ	150mL/分を超えない。

## 【操作方法又は使用方法等】

1. 規定の臨床ガイドラインに従って使用する麻酔システムすべてを点検してください。
2. 機器の各接続部と本品のコネクタやアクセサリを確実に接続してください。
3. 回路内を加圧し、回路や回路と機器との接続部でリークがないことを確認してください。
4. 本品にリークや閉塞、よじれ及びキンクが認められた場合は、新品に交換してください。
5. 伸ばすことのできる蛇管を使用する場合は、両手で蛇管を握り、コネクタや接続部が外れないようそっと伸ばし適切な長さに調節してください。

## 【使用上の注意】

### 〈重要な基本的注意〉

- ・本品とモニタ等の機器との接続はそれぞれの機器の取扱説明書に従って接続すること。
- ・本品に損傷又は異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないことを確認すること。
- ・本品を使用する前に、必ず下記を実施すること。
  1. すべての付属品及び接続部を確実に接続すること。
  2. 回路を加圧し、リークがないこと、チューブに閉塞、よじれ及びキンクがないことを確認すること。
- ・伸縮性の蛇管を引き伸ばす際は、コネクタや接続部が外れないよう注意すること。
- ・本品を改造しないこと。
- ・フィルタ使用時は、気道内圧を常にモニタリングすること。フィルタの目詰まりによって気道内圧に異常が認められた場合は、直ちにフィルタを新品と交換すること。
- ・フィルタは、吸気又は呼気側のフィルタとして使用すること。

### 〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

#### \*不具合

- ・蛇管の閉塞、狭窄、潰れ、折れ、キンク、破損、リーク、変形
- ・フィルタの狭窄、閉塞、ソケット、コネクタの変形、破損、リーク

#### \*有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常の恐れが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

- ・感染
- ・リーク、閉塞等による呼吸不全

### 〈その他の注意〉

- ・院内の感染防止の指針に従うこと。
- ・本品使用後は、関係法令を遵守し、適切に廃棄すること。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

### 〈貯蔵・保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

### 〈有効期間・使用の期限〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

## 【包装】

15個、20個、50個

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

\* \* (製造販売業者)

# smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

\* \* (問合せ先)

TEL (03) 3405-9300

〈製造業者〉

スミスヘルスケア マニュファクチャリング S.A. de C.V.

Smiths Healthcare Manufacturing S.A. de C.V.

〈国名〉

メキシコ

## 〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	再使用禁止
	添付文書を参照すること
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量