

機械器具 61 ストレート・ギアードアングルハンドピース JMDN コード 70692000

管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名 オサダ HL-C ハンドピース

(CH18/18B/24B)

【警告】

本機は歯科治療時以外には使用しないで下さい。有資格者による歯科治療領域にご使用下さい。

**【禁忌・禁止】

- 1) コントラヘッドはコントラシャंकにきちんと接続して使用して下さい。
- 2) 使用するバーはバーメーカー推奨回転速度以下で使用して下さい。
- * 3) 研磨剤(歯磨剤)を使う場合は、必ずプロフィヘッドを使用して下さい。コントラヘッドを使うと中に研磨剤が入り、故障の原因となります。
- 4) 分解、改造は絶対に行わないで下さい。

【形状・構造及び原理等】



※写真は CH18

商品名

HL-D 等速コントラヘッド (CH18)
HL-C 等速コントラヘッド (CH18B)
プロフィヘッド 2:1 (CH24B)

【使用目的・効能又は効果】

本品は、モータからの回転を等速又は変速して、歯又は義歯等を切削又は研磨する歯科用バー、リーマ等に伝達するために使用する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。

周囲温度	10-40 °C
相対湿度	30-75 %
気圧	700-1,060 hPa

2. 操作方法

1) 使用前の準備

- ① ハンドピースとコントラヘッドの接続
- ② ハンドピースとモータの接続

2) 使用前の点検

- ① バーの締め付け (指で引っ張り抜けないこと) を確認
- ② バーの回転確認。

3) 操作

- ① スイッチによる操作

4) 使用後の処理

- ① バーの取外し
- ② ハンドピースとコントラヘッドの取外し
- ③ ハンドピースとモータの取外し
- ④ 清掃・保守

**【使用上の注意】

1. コントラヘッドを落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。使用不能になる恐れがあります。
2. モータが回転している状態コントラシャंकとコントラヘッドの着脱を行わないで下さい。故障の原因となります。
3. ご使用前にコントラヘッドがコントラシャंकに確実に取り付けられているか確認して下さい。

4. 刃物が回転している状態で口腔内への出し入れをしないで下さい。患者さんがケガをする恐れがあります。
5. コントラヘッドへのバーの取付は回転が停止してから行って下さい。
6. ヘッドに取り付けた刃物は引張り抜けないことを確認して下さい。
7. 刃物の柄は $\Phi 2.35 \pm 0.016$ (ISO 規格) のものを使用して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管場所の環境条件

下記条件にて貯蔵・保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	-10-60 °C
相対湿度	10-90 %
気圧	700-1,060 hPa

直射日光に長時間さらさないこと。

2. 保管上の注意事項

- 1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れがない場所に保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 3) 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) などに対する安定状態に注意すること。

3. 耐用期間

製造の日から、正規の使用法、保守点検を行った場合に限り 7 年間。(自己認証による)

【取扱上の注意】

熟練した者以外は機器を使用しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

1. 消毒・滅菌

○ : 適用可 × : 適用不可

	消毒	滅菌	
	アルコール清拭	E0G 滅菌	高圧蒸気滅菌
CH18/18B/24B	○	○	○

2. 下記のことは行わないで下さい。錆、変色、故障の原因になります。

- ① 薬液への浸漬
- ② 酸性水・アルカリ水での洗浄・浸漬。
- ③ オートクレーブでの乾燥行程 (135°C を超える場合)。
- ④ 乾熱滅菌、高圧アルコール蒸気滅菌。

3. 滅菌パックに入れて滅菌をした後は、そのまま保管して下さい。

4. 使用後直ちに保守オイルで充分に注油・洗浄を行い、滅菌して下さい。

【包装】

包装単位 : 1 個口

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 : 長田電機工業株式会社
住所 : 〒459-8001 愛知県名古屋市長高町字中道 11
TEL : 052-621-3126
FAX : 052-621-8310
ホームページ : <http://www.osada-electric.co.jp>
製造元 : 長田電機工業株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい。