



【IS-28】

2016年4月(第1版)

医療機器認証番号:219AFBZX00019000

機械器具6 呼吸補助器  
管理医療機器 単回使用人工呼吸器呼吸回路 (JMDNコード 37706000)

## インターサージカル単回使用コネクタ

### 再使用禁止

#### 【警告】

＜使用方法＞

1. 本品を接続する際に、本品及び接続した他の呼吸回路構成部品に閉塞や漏れが生じないことを確認すること。
2. 使用中は、接続した呼吸回路全域において閉塞や漏れが生じることのないよう常に監視すること。


#### 【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用しないこと。[本品は単回使用のため]
2. コネクタ内側に内筒があるものには接続しないこと。  
[回路が閉塞する可能性があるため]
3. 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があるため]

#### 【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

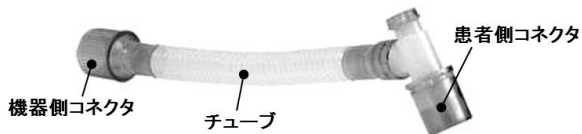

本品の機器側コネクタは22Fまたは15Mで人工呼吸器呼吸回路等に接続する。

品番	患者側コネクタ	回路長	備考	
3516000	22M/15F	0.23m	—	
3520000	スウィベル	0.21m	伸縮チューブ	
	7.6mmポート付き	(収縮時は0.14m)		
3501000	22M/15F	0.21m	—	
3502000		0.19m	伸縮チューブ	
3504000		0.20m	伸縮チューブ	
3511000		0.22m	—	
3508000	22M/15F 7.6mmポート付き	0.22m	—	
3514000	22M/15F ルアーロックポ	0.20m	伸縮チューブ	
3515000	ート付き	0.22m		
3506000	22M/15F スウィベル	0.23m	—	
3512000		0.21m	伸縮チューブ	
3512710		0.16m	10mm径 伸縮チューブ	
3505000	22M/15F スウィベル	0.23m	—	
3521710		0.16m	10mm径 伸縮チューブ	
5120000		9.5mmポート	0.16m	—
5180000		及び	0.20m	—
5250000		シールアラウン	0.27m	—
3521000		ドキャップ付き	0.21m	伸縮チューブ
		(収縮時は0.14m)		

#### 【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

人工呼吸器又は麻酔器から患者への空気又は酸素を含むガスの送入に用いること。

#### 【使用方法等】

＜使用方法＞

##### 1. 使用

- (1) 患者側コネクタと機器側コネクタをそれぞれ相手方に接続し、ガスラインを構成する。このとき、本品が構成するガスライン全体で、閉塞又はリーク(漏れ)などを起こさないことを必ず確認すること。
- (2) 使用中は、本品を接続したガスライン全体において閉塞又はリーク(漏れ)などの異常が起きていないことを確認すること。万一異常が起きた場合には、直ちに使用を中止すること。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- (2) コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力で接続すること。
- (3) 使用中は常に患者の状態及び本品の観察を行い、異常が無いことを確認すること。
- (4) 使用中、呼吸回路内に溜まった水分が逆流しないように、呼吸回路構成部品全体の配置に気をつけること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオン分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

＜有効期間＞

個別包装に記載。

＜使用期間＞

7日間 [自己認証(当社データ)による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited