

機械器具49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット JMDNコード 37243002

SKK ブラッドランセット 30G

再使用禁止

【警告】


- ①使用後の採血針には血液が付着しています。病原微生物の感染を防ぐために、使用後は他の人に触れないように廃棄してください。
 - ②感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときは、こまめに消毒してください。
 - ③前腕用採血器具をご使用いただくことで、前腕からの採血により測定を行うことが可能ですが、低血糖の症状があるときや運動の後など、血糖値が急激に変動する可能性があるときは、指先からの採血をしてください。
- ※急激な血糖変動が認められるとき、前腕の血糖変動は指先より遅れるとの報告があります。

【禁忌・禁止】

- ①再使用禁止。一度使用した採血針は必ず廃棄してください。
- ②使用時にすでに保護キャップがはずれていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。

*【形状・構造及び原理等】

1. 材 質
針 : ステンレス鋼
保護キャップ、ホルダー : ポリエチレン
2. 寸 法
針 : 30G

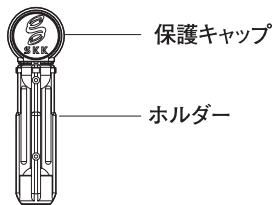

**【使用目的、効能又は効果】

本品は血糖値測定、血液型判定等の微量採血を目的とします。
ガンマ線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

*【操作方法又は使用方法等】

- ①本品は採血用穿刺器具に挿入して使用してください。
- ②採血時には、保護キャップをねじってホルダーから切りはなして使用してください。


<使用方法に関連する使用上の注意>

採血用穿刺器具の取扱説明書をあわせてご参照ください。

【使用上の注意】

- ①使用後は針に保護キャップをしてから、瓶や缶等に入れ廃棄してください。
- ②使用期限内のものを使用してください。
- ③小児の手の届かないところへ保管してください。

廃棄方法

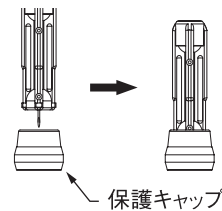

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限 (自己認証 (当社データ) により設定)
箱に記載しています。

【包装】

- 25本入, 30本入
25本入×8箱, 30本入×8箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社 旭ポリスライダー**
〒719-3226 岡山県真庭市三崎860-2
TEL0867-42-1171

製 造 元 **株式会社 旭ポリスライダー**

【販売業者の名称及び住所】

販 売 元 **株式会社 三和化学研究所**
SKK 〒461-8631 名古屋市東区東外堀町35番地

製品のお問い合わせは

フリーダイヤル (株)三和化学研究所 ☎0120-078130

365日24時間お受けいたします。