

機械器具49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット JMDNコード 37243002

SKK ブラッドランセット 30G

再使用禁止

【警告】


- ①使用後の採血針には血液が付着しています。病原微生物の感染を防ぐために、使用後は他の人に触れないように廃棄してください。
- ②感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、こまめに消毒してください。
- ③前腕用採血器具をご使用いただくことで、前腕からの採血により測定を行うことが可能ですが、低血糖の症状があるときや運動の後など、血糖値が急激に変動する可能性があるときは、指先からの採血をしてください。[急激な血糖変動が認められるとき、前腕の血糖変動は指先より遅れるとの報告があります。]

【禁忌・禁止】

- ①再使用禁止。一度使用した採血針は必ず廃棄してください。
- ②使用時にすでに保護キャップがはずれていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 材質
針 : ステンレス鋼
保護キャップ、ホルダー : ポリエチレン
2. 寸法
針 : 30G

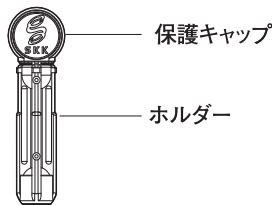

**【使用目的、効能又は効果】

本品は、血糖値測定、血液型判定等の微量採血を目的とします。
放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法等】

- ①本品は採血用穿刺器具に挿入して使用してください。
- ②採血時には、保護キャップをねじってホルダーから切りはなして使用してください。

<使用方法に関連する使用上の注意>

採血用穿刺器具の取扱説明書をあわせてご参照ください。

【使用上の注意】


<重要な基本的注意>

** 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

<その他の注意>

- **①使用後は針に保護キャップをしてから、針回収容器に入れ安全に廃棄してください。
- ②使用期限内のものを使用してください。
- ③小児の手の届かないところへ保管してください。

廃棄方法

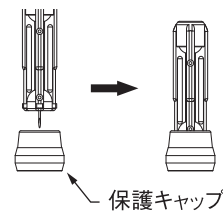

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

2. 使用期限

箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

【包装】

- 25本入、30本入
25本入×8箱、30本入×8箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社 旭ポリスライダー**
〒719-3226 岡山県真庭市三崎860-2
TEL0867-42-1171

製造元 **株式会社 旭ポリスライダー**

【販売業者の名称及び住所】

販売元 **株式会社 三和化学研究所**
SKK 〒461-8631 名古屋市東区東外堀町35番地

●製品の取扱いに関するお問い合わせは、三和化学研究所へ●
フリーダイヤル ハイサンフ
0120-07-8130
お問い合わせは365日24時間お受けいたします。