

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル 12235000

フェザートリミングナイフハンドル (F-80P)

【警告】


- 専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】

- 生体への使用禁止。
- 経時的な劣化等によって専用替刃が固定出来なくなったハンドルは使用しないこと。
- 汚れなどを落とす際にキシレン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないこと。*

【形状・構造及び原理等】

形状:

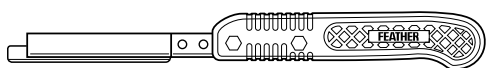

構造:スライド式

組成:刃装着部/ステンレス鋼
柄 部/ポリスルホン

【使用目的、効能又は効果】

組織の切断又は切離が可能な刃を取り付けるように設計された器具。


【品目仕様】

病理標本(臓器)の切り出しに用いる刀であり、専用替刃を装着し使用できる。耐熱、耐薬品性であり再使用可能なナイフハンドル。

(専用替刃)


フェザーミクロトーム替刃 S22, A35他

【操作方法、使用方法等】

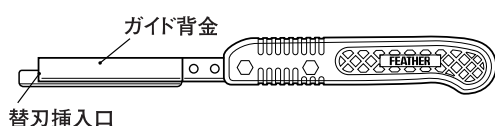

<替刃の装着方法>

1. 替刃を替刃挿入口から刃先を損傷しないようゆっくりと入れてください。
2. ガイド背金内の中央部に抜け止めがあるため替刃が斜めに入りますのでドライバーなどで押し戻し、刃先が左右均一に出るよう調節してください。

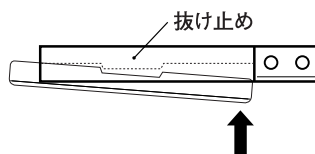

※替刃をお取り替えになる場合、替刃の先端部を下方にずらし、抜け止めから替刃がはずれたことを確認の上、ゆっくりと抜き取ります。



【使用上の注意】

- 替刃がハンドルに固定できたことを確認し、使用すること。
- 本品は【使用目的・効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 再滅菌は【保守点検に係わる事項】に従い行うこと。
- 廃棄の際は、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管する。
- 耐用年数 使用後1年 未使用品保証期間5年。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【保守点検に係わる事項】

■使用後の洗浄方法

- ご使用後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用方法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒液による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行ってください。

■再使用の為の滅菌方法

- 製品を適当な滅菌バック等に入れてください。
- 適当なオーブントレー又は、滅菌籠等に乗せてください。
- バリデート(有効性確認)された、高圧蒸気滅菌装置(摂氏135℃まで)、エチレンオキサイド滅菌装置を使用し、装置の手順に従い滅菌してください。
- 滅菌された製品は適切な方法で次回使用まで保管してください。。

【包装】

販売単位箱(1本入):ボール紙

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場

岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社

大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917