


器 34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル 12235000

フェザートリミングナイフハンドル (F-80ミニ)

●専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。

- 生体への使用禁止。
- 経時的な劣化等によって専用替刃が固定出来なくなったハンドルは使用しないこと。
- 滅菌禁止。

形状:

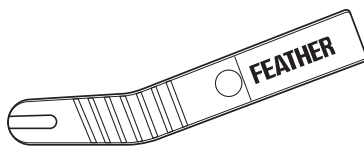

構造:ロック機構式

組成:柄 部/ポリアセタール


組織の切断又は切離が可能な刃を取り付けるように設計された器具。

病理標本(臓器)の切り出しに用いる刀であり、専用替刃を装着し使用できる。耐熱、耐薬品性であり再使用可能なナイフハンドル。


(専用替刃)

フェザーミクローム替刃 S22, A35他


<替刃の装着方法>

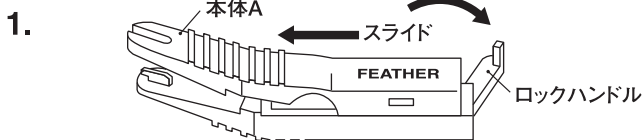


ロックハンドルをはずし、本体Aを左にスライドさせてください。

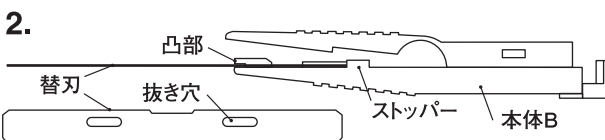

替刃の刃先を手前にして、本体Bの凸部に替刃の抜き穴を入れ、ストッパーに密着させてください。

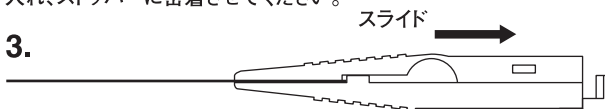

本体の先端を押さえ、凸部に先端に係合させながら右へスライドし、元の位置にしてください。

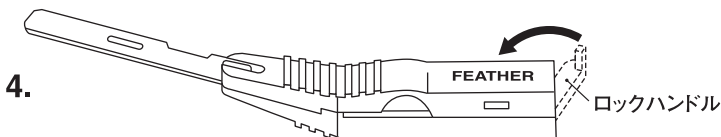

ロックハンドルを元の位置に戻してください。

- 替刃がハンドルに固定できたことを確認し、使用すること。
- 本品は の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 廃棄の際は、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管する。
- 耐用年数 使用後1年 未使用品保証期間5年。
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造パッチ

■使用後の洗浄方法

- ご使用後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用方法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒液による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行ってください。

個別包装(1本入):袋/ポリエチレン
販売単位箱(10本入):ボール紙

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

<製造元>フェザー安全剃刀株式会社

大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

<お問い合わせ>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917