

機械器具 34 医療用刀
一般医療機器 ナイフハンドル 12235000

フェザー替刃メスハンドル

【警告】

- 専用替刃は非常に鋭利な刃物であるため、取り扱いに注意すること。
- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。

【禁忌・禁止】

- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 経時的な劣化等によって専用替刃が固定出来なくなったハンドルは使用しないこと。
- 他社の替刃を取り付けないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状と品番

■ 替刃メスハンドル

No.3/No.3DLC



No.4/No.4DLC



■ 替刃メスハンドル(ロング)

No.7/No.7DLC



No.3L



No.4L



■ チタンハンドル

No.3T



組成:ステンレス鋼

チタニウム合金 (No.3T)

【使用目的、効能又は効果】


組織の切断又は切離が可能な刃を取り付けるように設計された金属製の手術器具。

【品目仕様】


専用ハンドルに替刃を取り付け使用する。
(専用替刃) フェザー替刃メス
フェザー替刃メスカーボン

【操作方法、使用方法等】

< 替刃の装着方法 >

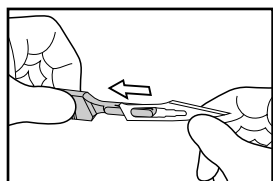


1. 替刃のガイド穴をハンドル先端の溝に合わせる。

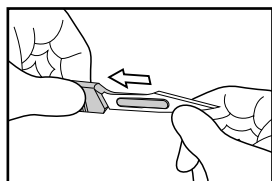


2. 替刃の刃先を手前に反らし、そのままカチッというまで押し込む。

< 替刃の取り外し方法 >

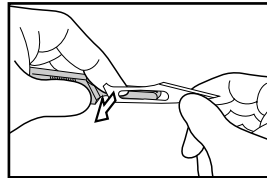

1. 左手で替刃の後部を手前に押し上げ、ハンドル先端より浮かす。

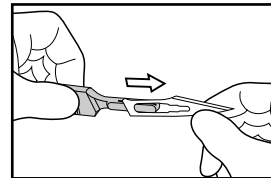

2. 替刃のガイド穴がハンドルから浮いた状態で替刃をゆっくりと引き出す。

【使用上の注意】

- 替刃がハンドルに固定できたことを確認し、使用すること。
- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 製品に破損などの異常が見られる場合は使用しないこと。
- 再滅菌は、【保守点検に係わる事項】に従い行うこと。
- 廃棄の際は、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光を避けて室温で保管すること。
- 耐用年数: 使用後1年 (未使用品保証期間5年)
- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【保守点検に係わる事項】

■ 使用後の洗浄方法

- ご使用後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗い流してください。
- 病院の指定する洗剤の使用法に従い蛋白質その他の汚れを入念に洗浄してください。
- 洗浄後は、直ちに蒸留水あるいは滅菌水で洗浄液を入念にすすいでください。
- 洗浄水を拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 損傷の無い事を確認してください。
- 消毒液による消毒が可能です。容量、用法については、各消毒液取扱説明書に従って行ってください。

■ 再使用の為の滅菌方法

- 製品を適当な滅菌バック等に入れてください。
- 適当なオーブントレー又は、滅菌籠等に掛けてください。
- バリデート(有効性確認)された、高圧蒸気滅菌装置(摂氏135℃まで)、エチレンオキサイド滅菌装置を使用し、装置の手順又は病院における滅菌の手順に従い滅菌してください。
- 滅菌された製品は、適切な方法で次回使用まで保管してください。

【包装】

個別包装(1本入):袋/PE

販売単位箱(10本入):ボール紙(表面ビニール塗布加工)

No.3Tのみ

個別包装・販売単位箱(1本入):ボール紙(表面ビニール塗布加工)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

< 製造販売元 > フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場

岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855

< 製造元 > フェザー安全剃刀株式会社 本社

大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631

< お問い合わせ先 > フェザー安全剃刀株式会社 東京支店

メディカル商品部 TEL.03-3864-0917