

医03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(JMDN:70976000)

メディフェンス検査・検診用手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品の再使用禁止
- ・本品の使用目的以外の使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とする検査・検診用の使い捨て手袋である。

左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。
パウダーなし、未滅菌である。

掌幅(mm) XS:76±4/S:86±4/M:98±4/L:107±4

全長(mm) 230 以上

【使用目的、効能又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為および汚染された医療材料を取扱う場合、患者および使用者を交差感染から守るために使用する。

【品目仕様等】

ASTM D6319 に準拠

(1) 引張強さ

(老化前)18.0MPa 以上、(老化後)16.0MPa 以上

(2) 切断時伸び率

(老化前)500%以上、(老化後)400%以上

但し、促進老化条件は 70±2℃、166±2 時間である。

【使用方法等】

小箱上部のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

(1) 全般的な注意

- 1) 同一患者のみに使用すること。
- 2) 本品に穴を開けるなど加工または分解しないこと。
- 3) 薬品・溶剤等によっては手袋に影響を与える可能性があるため、確認の上使用すること。尚、本品を強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。

4) かゆみ、かぶれ、発疹、ショック等の症状が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すること。

(2) 使用前の注意

- 1) 適切なサイズ等の製品を選択し、使用すること。
- 2) 製品に破損や汚損がある場合や、ピンホールなどの異常が認められる場合には使用をしないこと。

(3) 使用中の注意

鋭利な器具等に触れると、破れや穴があくことがあるので注意し、破れた場合は新しい製品に交換すること。

(4) 使用後の注意

本品は単回使用であり、使用后、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【保管方法及び使用期間等】

(1) 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光および高温、多湿な場所を避けて保管すること。包装開封後は、直射日光や強い人工光線灯等の紫外線を避け、X線機器等に近づけないこと。

(2) 使用の期限

使用期限内で使用する。

製造年月より3年[自己認証による]

(使用期限は本品の包装に記載、EXP DATE)

【包装】

250枚/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

・製造販売元: 川西工業株式会社

岐阜県安八郡神戸町大字神戸 1753 番地の 5

TEL: 0584-27-3161

(文献請求、問合せ先も上記に同じ)

・外国製造元: ハー talega エヌジーシー エスディーエヌ
ビーエイチディー

Hartalega NGC Sdn. Bhd. (マレーシア)