

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用人工呼吸器呼吸回路 37706000

S ウェーブ カット蛇管

再使用禁止


【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

001860 S ウェーブ カット蛇管 183cm

001861 S ウェーブ カット蛇管 152cm

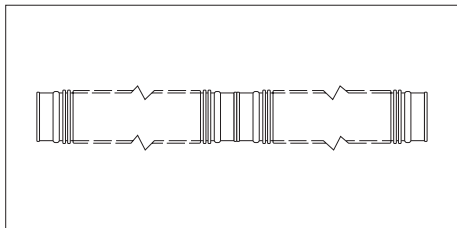

本品は152cm又は183cmにカットされた蛇管であり、必要に応じて更に節毎にカットして使用できます。

〈原材料〉EVA

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

単回使用人工呼吸回路の定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果。人工呼吸器から患者へ空気や酸素等を送入するのに用いる蛇管である。

【使用方法等】

1. 規定の臨床ガイドラインに従って使用する呼吸器システムすべてを点検してください。
2. 蛇管を外径22mmの機器に接続して使用してください。
3. 回路内を加圧し、回路や回路と機器との接続部でリークがないことを確認してください。
4. 本品にリークや閉塞、よじれ及びキンクが認められた場合は、新品と交換してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品とモニタ等の機器との接続はそれぞれの機器の取扱説明書に従って接続すること。
- 2) 使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないことを確認すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

・蛇管の閉塞、狭窄、潰れ、折れ、キンク、破損、リーク

2) その他の有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常の恐れが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

・感染

・リーク、閉塞等による呼吸不全

〈その他の注意〉

- 1) 本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留する恐れがあるため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* * 〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

* * 〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	再使用禁止
	注意
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量