

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路除菌用フィルタ 35070000

PORTEX・フィルタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


〈併用医療機器〉

1) ネブライザと併用しないこと。なお詳細は、【使用上の注意】〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関する事）〉を参照のこと。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

002862 プリージングフィルタ

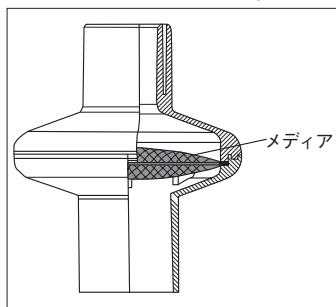

重量	20 g
死腔量	32 mL
ろ過効率（細菌、ウイルス）	>99.9%
コネクタ部接続	患者側：内径15mm×外径22mm 機械側：内径22mm

〈原理〉

本品は、双方向のろ過機能を有し、呼吸器系統に存在する微生物等による感染を最小限に抑える。

人工呼吸器、麻酔器あるいは呼気ガスや吸気ガスのろ過が必要となる大気開放的なフローシステムに使用する。

〈原材料〉

名 称		原 材 料
フィルタ	ハウジング	ブタジエンスチレン樹脂
	メディア	ポリプロピレン

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は、ろ過機能を有するフィルタで呼吸回路等に接続して、ガス中の細菌やウイルス等を除去することで呼吸システムや患者への交差感染を防止するために使用する。単回使用。

【使用方法等】

1. 本品を適切に呼吸回路に接続し、リークチェックをしてください。
2. 本品は24時間毎に交換、又は24時間以内でも、必要に応じ交換してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 使用前にどの接続部分にもリークや閉塞がないこと、異物が付着していないことを確認すること。
- 2) 本品の死腔が換気に影響するか、患者毎に評価して使用すること。

〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関する事）〉

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ネブライザ	本品に使用しないこと。	フィルタが目詰まりを起こし、患者が呼吸困難を起こす恐れがあるため。

〈その他の注意〉

- 1) 本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと [フィルタが濡れると呼吸抵抗が増加する、又有害な残留物を貯留させたり、感染性物質を伝播させる恐れがあるため]。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈使用期間〉

- ・最長24時間で交換すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※※（製造販売業者）

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

※※（問合せ先）

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	再使用禁止
	注意
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量