



【GM-24】

** 2016 年 10 月（第 8 版）（新記載要領に基づく改訂）

* 2014 年 4 月（第 7 版）

医療機器承認番号：22000BZX01579000

機械器具 6 呼吸補助器

管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ（JMDN コード：34838012）

呼吸回路用アダプター

再使用禁止

【警告】

** <使用方法>

使用前に本品の接続に誤りがないか、使用前及び使用中に各接続部が気密かつ確実であり、漏れや閉塞がないことを確認すること。[適切な酸素投与を行えないおそれがある。]

【禁忌・禁止】

<使用方法>

** 1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

<形状>

本品は未滅菌品である。

19010



オキシジェンマスク専用

001692




オキシジェンマスク
エアロゾル型専用
蛇管接続部：外径 22mm

157802



水平方向：外径 15mm
垂直方向：内径 15mm 外径 22mm

SW8310

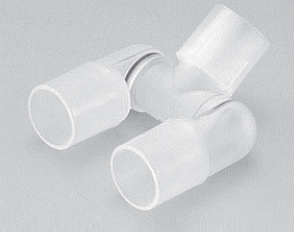

左右接続部：外径 22mm
中央接続部：内径 15mm 外径 22mm

001575




水平方向：両端外径 22mm
垂直方向：内径 15mm 外径 22mm

001674



両端：外径 22mm
片端：内径 15mm

001675

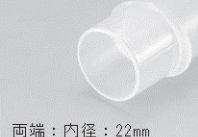

両端：内径：22mm

カタログ番号	品 名
19010	オキシジェンスピゴットコネクタ
001692	ラージボアチュービングアダプター
157802	ダブルスイベルエルボーアダプター
SW8310	スイベル Y アダプター
001575	トラキ T 型アダプター
001674	インチューベーションアダプター
001675	カフコネクタ

<作動・動作原理>

各コネクタ接続部が、ISO5356-1 に準拠した 15mm あるいは 22mm の内径もしくは外径であり、複数の呼吸回路を接続する。

【使用目的又は効果】

** <使用目的>

単回使用呼吸回路用コネクタの定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果

【使用方法等】

<使用方法>

接続しようとする呼吸回路部品に対して、本品のうち適切な部品を選択し、接続部に緩みがないように確実に接続する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ** 1. 気管内チューブ又は気管切開チューブと接続する際は、必ず呼気の排出口があることを確認すること。[気道内圧の上昇により気道損傷のおそれがある。]
- ** 2. 火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは酸素を使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ** (1) 本品の滅菌は行わないこと。[製品に変形及び破損の発生、有毒ガスが残留するおそれがある。]
- ** (2) フェノールやエーテルなどの有機溶媒やホルマリン系消毒剤は使用しないこと。[製品の変形及び破損のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

** 1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

* <有効期間>

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

** 電話番号：06-6222-6606

* 製造元

ゲイルメッド社(台湾)

GaleMed Corporation