

**機械器具(05) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
*管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000

パラレルY呼吸回路

YP-60、YP-90、YP-120、YP-150、YP-200
YA-90、YA-120、YA-150、YA-200、YA-300、YA-500

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. オートクレーブによる滅菌禁止

(麻酔器)から、吸気管を通して、患者へ空気又は酸素を含む医療ガスを送入する。患者から排出される呼気は呼気管を通り装置へ戻される。

【形状・構造及び原理等】

1. 各構成品の名称

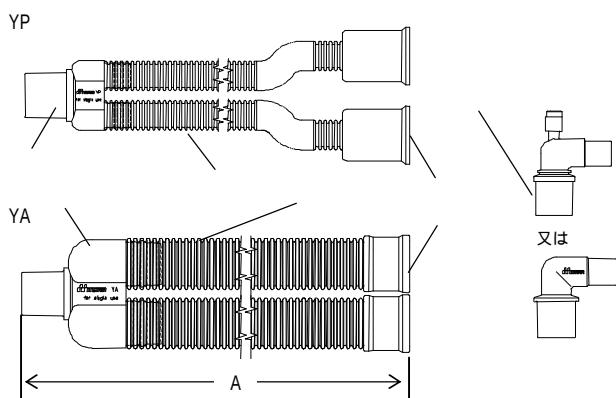

番号	部品名
	呼吸管小
	呼吸管大
	パラレルYピース小
	パラレルYピース大
	22mm メスコネクタ小
	22mm メスコネクタ大
	エルボコネクタ

エルボコネクタ患者側の寸法: I.D.15mm / O.D.22mm
エルボコネクタは単品として販売されます。 **

2. 種類と構成

型 式	公称全長 (cm) A 部寸法
YP-60	60
YP-90	90
YP-120	120
YP-150	150
YP-200	200
YA-90	90
YA-120	120
YA-150	150
YA-200	200
YA-300	300
YA-500	500

本品には、ラテックスゴムを使用していません。

3. 原理

人工呼吸器が内蔵もしくは、外部接続されている麻酔システム

【使用目的、効能又は効果】

人工呼吸器が内蔵もしくは、外部接続されている麻酔システム(麻酔器)から患者への空気又は酸素を含むガスの送入に用いること。エルボコネクタは、手術中にマスクや気管チューブと呼吸回路のパラレルYピースを接続するために用いること。

【品目仕様等】

	項目	仕様
1	寸法	実測長は公称全長の±10%以内
2	空気流に対する抵抗*	YP-60 : 毎分 35L 0.2kPa YP-90 : 毎分 30L 0.2kPa YP-120 : 毎分 30L 0.2kPa YP-150 : 毎分 28L 0.2kPa YP-200 : 毎分 26L 0.2kPa YA-90 : 毎分 60L 0.2kPa YA-120 : 毎分 60L 0.2kPa YA-150 : 毎分 55L 0.2kPa YA-200 : 毎分 55L 0.2kPa YA-300 : 毎分 50L 0.2kPa YA-500 : 毎分 50L 0.2kPa
3	組み込み型 両端の引き抜き	引き抜き強度: 45N 以上
4	漏れ	空気圧 60hPa での漏れ量が 毎分 50mL 以下
5	屈曲による 抵抗の上昇	呼吸管が直径 25mm の金属 円筒による屈曲時には管 がまっすぐな場合の値の 150% 以下。
6	コンプライ アンス	10mL/kPa/m 以下

【操作方法又は使用方法等】

本品は未滅菌である。また、単回使用製品であるので、1 回限りの使用のみで、再使用しないこと。

1. 使用前

- (1) 呼吸管の 22mm メスコネクタ大(小人用では 22mm メスコネクタ小)を麻酔器等の装置の吸気接続口、呼気接続口にしっかりと接続する。
- (2) パラレルYピース大(小人用ではパラレルYピース小)の患者側端へ、必要に応じて付属のエルボコネクタを接続する。
- (3) 併用する装置の添付文書等に従って漏れを確認する。

2. 使用后

本品使用後の廃棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などに従い適切に処理すること。

【使用上の注意】

- 1 . 本品は、単回使用製品なので、再使用しないこと。
- 2 . 本品を組立てるときに、アルコールや界面活性剤の液体を使用して取付けないこと。〔樹脂部品にひびを生ずることがある〕
- 3 . 本品の包装に破れ、汚れなど異常がある場合は使用しないこと
- 4 . 本品の外観に異常がないことを確認してから使用すること。
- 5 . 呼吸管を極端に折り曲げないこと。
- 6 . 長時間使用すると、呼気側呼吸管に水滴が溜まるので注意すること。
- 7 . 加温加湿器を併用する場合、最高稼働温度が 60 以上のガスを呼吸管に流さないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1 . 貯蔵・保管方法
水漏れ、ほこり、高温（50 以上）多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所などは避けること。
- 2 . 有効期間・使用の期限
ラベルに記載されている製造年月から 3 年。

【包装】

1 個 / 1 密閉袋 に収納。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2 - 1 1 - 1

製造業者

メラセンコー コーポレ - ション
(MERASENKO CORPORATION)
国名：フィリピン

お問い合わせ先

本社商品部 TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011