

機械器具(05) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん\*  
管理医療機器 単回使用麻酔器用呼吸回路 37704000  
(単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012) \*\*

## パラレルY呼吸回路

YP-60、YP-90、YP-120、YP-150、YP-200  
YA-90、YA-120、YA-150、YA-200、YA-300、YA-500


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. オートクレーブによる滅菌禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 各構成品の名称

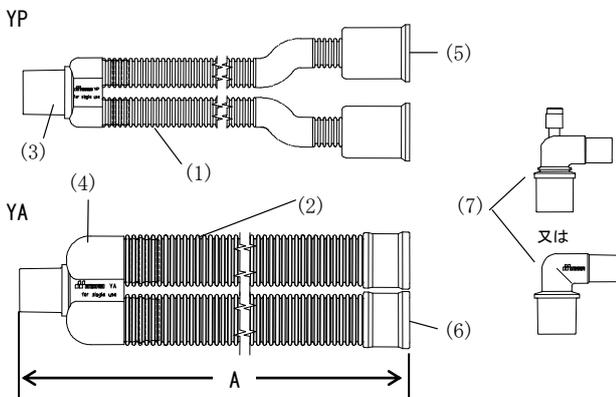

番号	部品名
(1)	呼吸管小
(2)	呼吸管大
(3)	パラレルYピース小
(4)	パラレルYピース大
(5)	22mm メスコネクタ小
(6)	22mm メスコネクタ大
(7)	エルボコネクタ

※エルボコネクタ患者側の寸法: I.D. 15mm / O.D. 22mm  
エルボコネクタは単品として販売される。\*

#### 2. 種類と構成

型式	公称全長 (cm) 外観図 A 部寸法
YP-60	60
YP-90	90
YP-120	120
YP-150	150
YP-200	200
YA-90	90
YA-120	120
YA-150	150
YA-200	200
YA-300	300
YA-500	500

※ 本品には、ラテックスゴムを使用していない。

#### 3. 原理

人工呼吸器が内蔵もしくは、外部接続されている麻酔システム(麻酔器)から、吸気管を通して、患者へ空気又は酸素を含む医療ガスを送入する。患者から排出される呼気は呼気管を通り装置へ戻される。

#### 【使用目的、効能又は効果】

人工呼吸器が内蔵もしくは、外部接続されている麻酔システム(麻酔器)から患者への空気又は酸素を含むガスの送込に用いること。エルボコネクタは、手術中にマスクや気管チューブと呼吸回路のパラレルYピースを接続するために用いること。

#### 【品目仕様等】

項目	仕様
1 寸法	実測長は公称全長の±10%以内
2 空気流に対する抵抗	YP-60 : 毎分 35L ≤ 0.2kPa YP-90 : 毎分 30L ≤ 0.2kPa YP-120 : 毎分 30L ≤ 0.2kPa YP-150 : 毎分 28L ≤ 0.2kPa YP-200 : 毎分 26L ≤ 0.2kPa YA-90 : 毎分 60L ≤ 0.2kPa YA-120 : 毎分 60L ≤ 0.2kPa YA-150 : 毎分 55L ≤ 0.2kPa YA-200 : 毎分 55L ≤ 0.2kPa YA-300 : 毎分 50L ≤ 0.2kPa YA-500 : 毎分 50L ≤ 0.2kPa
3 組み込み型両端の引き抜き	引き抜き強度: 45N 以上
4 漏れ	空気圧 60hPa での漏れ量が毎分 50mL 以下
5 屈曲による抵抗の上昇	呼吸管が直径 25mm の金属円筒による屈曲時には管がまっすぐな場合の値の 150% 以下
6 コンプライアンス	10mL/kPa/m 以下

#### 【操作方法又は使用方法等】

本品は未滅菌である。また、単回使用製品であるので、1 回限りの使用のみで、再使用しないこと。

##### 1. 使用前

- (1) 呼吸管の 22mm メスコネクタ大(小人用では 22mm メスコネクタ小)を麻酔器等の装置の吸気接続口、呼気接続口にしっかりと接続する。
- (2) パラレルYピース大(小人用ではパラレルYピース小)の患者側端へ、必要に応じて付属のエルボコネクタを接続する。
- (3) 併用する装置の添付文書等に従って漏れを確認する。

## 2. 使用後

本品使用後の廃棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などに従い適切に処理すること。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意 \*\*

1. 本品は目的用途以外には使用しないこと。 \*\*
2. 他の医療機器と組み合わせて使用する際は、安全確認を行ってから使用すること。 \*\*
3. 本品は、単回使用製品なので、再使用しないこと。
4. 本品を組立てるときに、アルコールや界面活性剤の液体を使用して取付けないこと。 [樹脂部品にひびを生ずることがある]
5. 本品の包装に破れ、汚れなど異常がある場合は使用しないこと。
6. 本品の外観に異常がないことを確認してから使用すること。
7. 呼吸管を極端に折り曲げないこと。
8. 長時間使用すると、呼気側呼吸管に水滴が溜まるので注意すること。
9. 加温加湿器を併用する場合、最高稼働温度が 60℃以上のガスを呼吸管に流さないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

水漏れ、ほこり、高温（50℃以上）、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所などは避けること。

#### 2. 有効期間・使用の期限

ラベルに記載されている製造年月から3年。

[自己認証（当社データ）による] \*\*

### 【包装】

1個 / 1密閉袋 に収納。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社

埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション

(MERASENKO CORPORATION)

国名：フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画

TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011