

器 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

再使用禁止

マルチレット

【警告】

●適用対象(測定者)

採血をした後のマルチレットには血液が付着しています。病原微生物の感染を防ぐために、使用後はかかりつけの医師の指示にしたがって他人に接触しないように捨ててください。

●使用方法

感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときは、医師の指導を受けてください。

●併用医療用具

前腕用採血器具をご使用いただくことで、前腕からの採血により測定を行うことが可能ですが、次のようなときは、指先からの採血をしてください。

- ・運動の後など、血糖値が急激に変化する可能性があるとき
- ・発汗/冷や汗、浮揚感、震えなど低血糖の症状があるとき
- ・血糖低下状態で、すぐに低血糖かどうかを知る必要があるとき
- ・かぜをひいたときなど、体調のすぐれないとき

※急激な血糖の変動が認められるとき、前腕の血糖変動は指先よりも遅れるとの報告があります。

【禁忌・禁止】

- ① 再使用禁止。マルチレットは使い捨てです。一度使用したマルチレットは再使用せずに、必ず新しいマルチレットをご使用ください。
- ② 使用時にすでに保護キャップがはずれていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。
- ③ 小児の手の届かないところへ保管してください。
- ④ マルチレットは使用期限内のものを使用してください。

【使用目的】

本品は血糖値測定、血液型判定等の微量採血を目的とします。放射線照射滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法】

- ① マルチレットは穿刺具に挿入してご使用ください。
- ② 採血時には、保護キャップをねじってホルダーから切りはなし、採血してください。

<使用方法に関連する使用上の注意>

詳細な使用方法是穿刺具の取扱説明書をご参照ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
外箱に記載しています。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

** 25本×1箱、25本×8箱、30本×8箱で梱包しています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*販売元 **アークレイ株式会社**
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町 57
TEL 0120-81-1955

*製造販売元 **株式会社旭ポリスライダー**
〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2
TEL 0867-42-1171

*製造元 **株式会社旭ポリスライダー**

【形状・構造及び原理等】

針材質 : ステンレス鋼

保護キャップ: ポリエチレン



----- 保護キャップ

----- ホルダー