

再使用禁止

マルチレット

【警告】

●適用対象(測定者)

採血をした後のマルチレットには血液が付着しています。病原微生物の感染を防ぐために、使用後はかかりつけの医師の指示にしたがって他人に触れないように捨ててください。

●使用方法

感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときは、医師の指導を受けてください。

●併用医療機器

前腕用穿刺器具をご使用いただくことで、前腕からの採血により測定を行うことが可能ですが、次のようなときは、指先からの採血をしてください。

- ・運動の後など、血糖値が急激に変化する可能性があるとき
- ・発汗/冷や汗、浮揚感、震えなど低血糖の症状があるとき
- ・血糖低下状態で、すぐに低血糖かどうかを知る必要があるとき
- ・かぜをひいたときなど、体調のすぐれないとき


※急激な血糖の変動が認められるとき、前腕の血糖変動は指先よりも遅れるとの報告があります。

【禁忌・禁止】

- ① 再使用禁止。マルチレットは使い捨てです。一度使用したマルチレットは再使用せずに、必ず新しいマルチレットをご使用ください。
- ② 使用時にすでに保護キャップがはずれていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。
- ③ 小児の手の届かないところへ保管してください。
- ④ マルチレットは使用期限内のものを使用してください。

*【形状・構造及び原理等】

針材質 : ステンレス鋼
保護キャップ: ポリエチレン

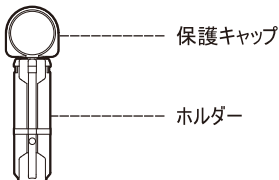

【使用目的、効能又は効果】

本品は血糖値測定、血液型判定等の微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法等】

- ① マルチレットは穿刺器具に挿入してご使用ください。
- ② 採血時には、保護キャップをねじってホルダーから切りはなし、採血してください。
- *③ 使用后、廃棄するために保護キャップを被せてください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- **① 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- **② 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
- **③ 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害
- ④ 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]

<その他の注意>

*マルチレットには適応する穿刺器具があります。穿刺器具の取扱説明書をご参照ください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
2. 使用期限
箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

【包装】

25本×1箱、25本×8箱、30本×8箱で梱包しています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社旭ポリスライダー**
〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2
TEL 0867-42-1171

製 造 元 **株式会社旭ポリスライダー**

販 売 元 **アークレイ株式会社**
〒601-8045 京都市南区東九条西明田町 57
<問い合わせ先>
アークレイ コールセンター
TEL 0120-81-1955
6:00~22:00 (年中無休)