


「アルサトーム SU」の付属品 バイポーラコード CPB/E

【禁忌・禁止】*

- ・本品は「アルサトーム SU」とのみ接続し、他の電気メスに接続しないこと。[誤接続防止のため。]
- ・超音波での洗浄禁止。[材質が劣化する可能性があるため。]
- ・オートクレーブ滅菌する際には滅菌および乾燥の工程で 134℃を超えないこと。[変形や破損の恐れがあるため。]
- ・包装や内容物に損傷がある場合には使用しないこと。
- ・本品の改造はしないこと。

【形状・構造及び原理】

本品は、「アルサトーム SU」とその付属品である「バイポーラフォーセップ」を接続するためのコードである。

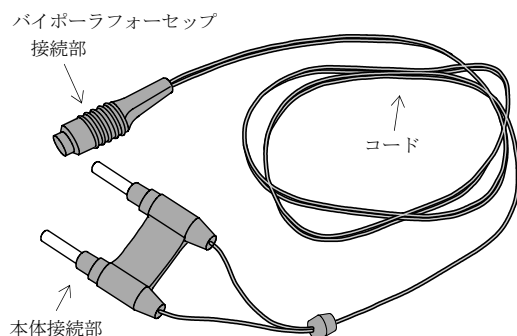

製品番号	製品名
#9420	アルサトーム SU バイポーラコード CPB/E

【使用目的、効能又は効果】

本品は、「アルサトーム SU」と「バイポーラフォーセップ」を接続するためのコードである。なお「アルサトーム SU」は、高周波電流を用いた生体組織の切開または凝固を行うために外科手術に使用するためのものである。

【使用目的に関連する使用上の注意】*

本品は、「アルサトーム SU」とのみ接続し、他の電気メスに接続しないこと。

【品目仕様等】

JIS T 0601-2-2(電気手術器の安全に関する個別要求事項)による。
定格電圧: 550Vp

【操作方法又は使用方法等】

「アルサトーム SU」の添付文書および取扱説明書も参照すること。

【A. 滅菌】

- ①本品は未滅菌品のため、包装から取り出し表面の埃を取り除いた後、以下の方法によって滅菌する。

滅菌方法	滅菌条件
オートクレーブ滅菌	121℃、20 分以上 または 134℃、10 分以上
EOG 滅菌	ガス種類: エチレンオキシサイドガス ガス濃度: 400~600mg/L 温度: 50~55℃ 湿度: 40~60RH% 圧力: 58~137kPa 作用時間: 5 時間以上

【注意】

- ・オートクレーブ滅菌の際には滅菌および乾燥の工程で 134℃を超えないこと。[変形や破損の可能性があるため。]
- ・コードは強く曲げないこと。[断線の可能性があるため。]
- ・オートクレーブ滅菌した場合には、使用前に十分乾燥させること。[感電のおそれがあるため。]

【B. 接続】

- ①本体接続部を本体のバイポーラソケットに差し込み、さらにバイポーラフォーセップ接続部に「バイポーラフォーセップ」を差し込む。(＋の極性はない。)

【注意】

- ・接続が緩くないことを確認すること。[通電が妨げられたり、使用中にはずれたりする恐れがあるため。]
- ・本品に「バイポーラフォーセップ」を差し込む際、本体のフットスイッチには触れないこと。[誤った出力での熱傷を防止するため。]

【C. 操作】

- ①本体の出力を適切に調整して、フットスイッチで出力する。

【D. 使用後の処置】

- ①本品を本体から外し、さらに本品から「バイポーラフォーセップ」を外す。

【注意】

- ・外す際には、コードを持たず必ず本体接続部あるいはバイポーラフォーセップ接続部を持つこと。[断線の可能性があるため。]
- ②次回の使用に備え、清浄にする。

【使用上の注意】

- ・本品は「アルサトーム SU」と組み合わせて使用すること。
[これ以外の組み合わせ、あるいは単体使用では機能せず、適正使用範囲外となるため。]
- ・本品のコードを強く曲げないこと。[断線の可能性があるため。]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・水濡れ、高温多湿、直射日光を避け、できるだけ清潔な環境で室温保存すること。
- ・本体および本品その他のアクセサリ等の定期点検は必ず行うこと。

【取扱以上の注意】

- ・本品の改造はしないこと。
- ・本品の修理はメーカーもしくはメーカーが認める専門家にまかせること。
- ・廃棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「感染性廃棄物マニュアル」に従い専門業者に委託するなど適切に処理すること。

【保守・点検に係る事項】

【使用前点検】

使用上不具合を生じる損傷や変形、著しい変色、さび、腐食その他の不良があるか確認し、それらがあるものは使用しないこと。

【洗浄方法】

1. 使用中に付着した組織片等、目に見える汚れは柔らかい非金属製の機器洗浄用ブラシを用い、中性洗剤等を用いて除去してください。
2. 残留洗剤や組織片等がなくなるまで清浄な水で完全にすすぎ、清潔な布で拭いて完全に乾燥させてください。

「アルサトーム SU」の取扱説明書を必ずご参照ください。

【包装】

1 本／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売元〕

株式会社 高研

〒171-0031 東京都豊島区目白 3-14-3

TEL 03-3950-6600

〔製造業者〕

アルサ医療機械有限公司

ALSA Apparecchi medicali, s.r.l.

イタリア共和国

「アルサトーム SU」の取扱説明書を必ずご参照ください。

KOKEN 株式会社 高 研

2/2

C-1-399-9-01-01