

機械器具（05）麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん

*管理医療機器 単回使用麻酔器用呼吸回路 37704000

メラ麻酔器用呼吸回路（F 回路）

F90、F90R、F120、F120R、F150、F180


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. オートクレーブによる滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 各構成品の名称

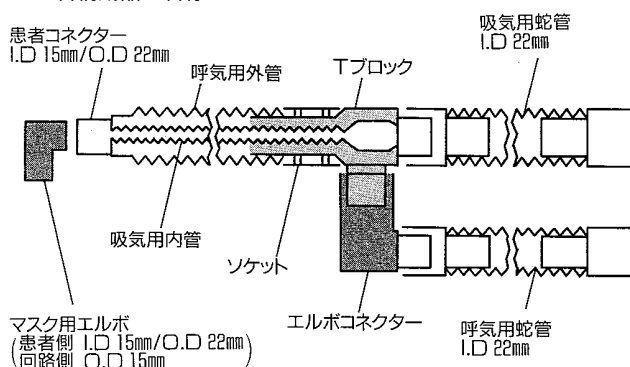


2. 種類と構成

型 式	2 重蛇管の長さ (mm)	呼気用蛇管/吸気用蛇管の ソケットの材質
F90	900	ポリエチレン樹脂
F90R	900	合成ゴム
F120	1200	ポリエチレン樹脂
F120R	1200	合成ゴム
F150	1500	ポリエチレン樹脂
F180	1800	ポリエチレン樹脂

本品には、ラテックスゴムを使用していません。

3. 原理

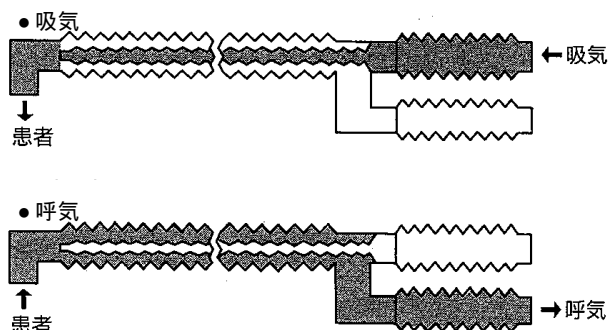

麻酔器から送気される吸気（空気又は酸素を含む医療ガス）は、吸気用蛇管から T ブロックに接続された吸気用内管を通して、患者へ送入される。患者から排出される呼気は、呼気用外管から T ブロックに接続された呼気用蛇管を通り装置へ戻される。

【使用目的、効能又は効果】

全身麻酔を施すための機器のうち、麻酔器用呼吸回路。

【品目仕様等】

1. 漏れ：空気圧 30hPa での漏れ量が毎分 30mL 以下。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の吸気用蛇管のソケットを麻酔器の吸気弁側に接続し、呼気側用蛇管のソケットを呼気弁側に接続する。
2. 患者コネクタ（又は付属のマスク用エルボ）は、外径 22 mm 内径 15 mm になっていますので そのままマスク又は気管内チューブに接続する。
3. 本品を 別売の F 呼吸回路ホルダーと組み合わせるとベイン回路として使用できる。
その使用方法の概要は次の通り。
 - 1) 本品のエルボコネクタを外し、T ブロックへ F 呼吸回路ホルダーのエルボコネクタ部に接続する。
 - 2) 本品の呼吸用蛇管には、麻酔器の本体からフレッシュガスを流す。

関連注意 F 呼吸回路ホルダーと組み合わせについては、F 呼吸回路ホルダーの添付文書も参照すること。

【使用上の注意】

1. 本品は、1 回使用製品なので、再使用しないこと。
2. 本品を組立てるときに、アルコールや界面活性剤の液体を使用して取付けないこと。【樹脂部品にひびを生ずることがある】
3. 本品を使用する前に、梱包が損傷を受けていたり、回路が損傷（亀裂・破損）・変色・変形している場合は使用しないこと。
4. 蛇管を極端に折り曲げないこと。
5. 内管を吸気側、外管を呼気側にして使用すること。【もし、逆に接続すると内管に呼気の水 droplet が溜まり雑音が生じたり、呼気抵抗が上がる】
なお、長時間使用すると、外管にも水滴が溜まることある。
6. 本品を麻酔器等の装置に取り付けたときは、装置の添付文書に従ってリーク試験を行い、リークがないことを確認してから使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
常温・常湿で直接日光に当たらないこと。
2. 有効期間・使用の期限
ラベルに記載されている製造年月から 3 年。

【包装】

1 個 / 1 密閉袋 / 1 包装箱に収納。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2 - 1 1 - 1

製造業者
メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名：フィリピン

お問い合わせ先
本社商品部 TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011