

機械器具(05) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん  
\*管理医療機器 単回使用麻酔器用呼吸回路 37704000

## メラ麻酔器用呼吸回路 (F回路ライト)

FL45/90、FL90/30、FL120/30、FL150/30、FL180/30


再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. オートクレーブによる滅菌禁止

### 【形状・構造及び原理等】

1. 各構成品の名称

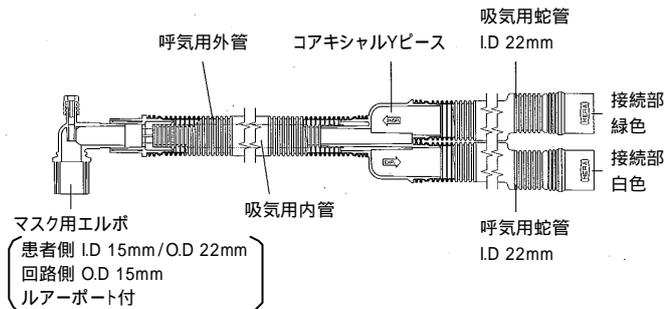


2. 種類と構成

| 型 式      | 同軸蛇管の長さ (mm) | 吸気用蛇管及び呼気用蛇管の長さ (mm) | 構 成   |
|----------|--------------|----------------------|-------|
| FL45/90  | 450          | 900                  | セット   |
| FL90/30  | 900          | 300                  | セット   |
| FL120/30 | 1200         | 300                  | セット   |
| FL150/30 | 1500         | 300                  | セット   |
| FL180/30 | 1800         | 300                  | セット   |
| マスク用エルボ  |              |                      | 交換用部品 |

本品には、ラテックスゴムを使用していません。

3. 原理

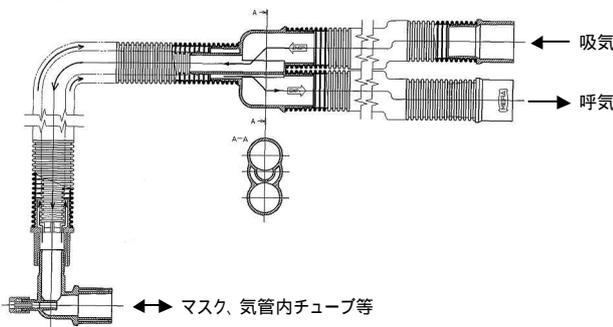

麻酔器から送気される吸気(空気又は酸素を含む医療ガス)は、吸気用蛇管からコアキシャルYピースに接続された吸気用内管を通して、患者へ送入される。患者から排出される呼気は、呼気用外管からコアキシャルYピースに接続された呼気用蛇管を通り装置へ戻される。

### 【使用目的、効能又は効果】

全身麻酔を施すための機器のうち、麻酔器用呼吸回路。

### 【品目仕様等】

1. 漏れ: 空気圧 30hPa での漏れ量が毎分 30mL 以下。

### 【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の吸気用蛇管のソケット(緑色)を麻酔器の吸気弁側に接続し、呼気側用蛇管のソケット(白色)を呼気弁側に接続する。
2. 患者コネクター(マスク用エルボ)は、外径 22mm 内径 15mm なので、そのまま マスク又は気管内チューブに接続する。

### 【使用上の注意】

1. 本品は、1回使用製品なので、再使用しないこと。
2. 本品を組立てるときに、アルコールや界面活性剤の液体を使用して取付けないこと。[樹脂部品にひびを生ずることがある]
3. 本品を使用する前に、梱包が損傷を受けていたり、回路が損傷(亀裂・破損)・変色・変形している場合は使用しないこと。
4. 蛇管を極端に折り曲げないこと。
5. 内管を吸気側、外管を呼気側にして使用すること。  
[もし、逆に接続すると内管に呼気の水滴が溜まり雑音が生じたり、呼気抵抗が上がる]  
なお、長時間使用すると、外管にも水滴が溜まることある。
6. 本品を麻酔器等の装置に取り付けたときは、装置の添付文書に従ってリーク試験を行い、リークがないことを確認してから使用すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法  
貯蔵・保管条件: 常温・常湿で直接日光に当たらないこと。
2. 有効期間・使用の期限  
ラベルに記載されている製造年月から 3年。

### 【包装】

| 製品構成  | 包 装                      |
|-------|--------------------------|
| セット   | 1セット / 1密閉袋に収納。          |
| 交換用部品 | 1個 / 1密閉袋、10密閉袋 / 1箱に収納。 |

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者  
泉工医科工業株式会社  
埼玉県春日部市浜川戸 2 - 1 1 - 1

製造業者  
メラセンコー コーポレーション  
(MERASENKO CORPORATION)  
国名: フィリピン

お問い合わせ先  
本社商品部 TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011