

機械器具(05) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔器用呼吸回路 37704000

メラ麻酔器用呼吸回路 (F回路ライト)

FL45/90、FL90/30、FL120/30、FL150/30、FL180/30


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. オートクレーブによる滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 各構成品の名称

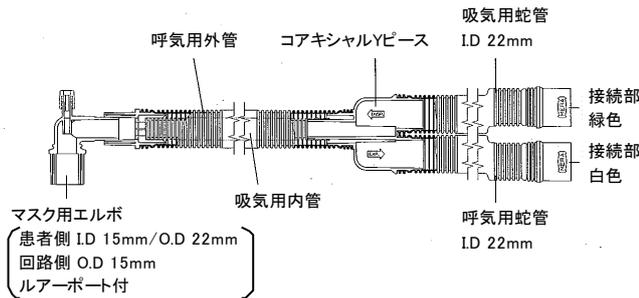


本品には、ラテックスゴムを使用していない。

| 型式 | 全長(m) | 定格流量(L) ※1 |
|----------|-------|------------|
| FL45/90 | 1.4 | 35 |
| FL90/30 | 1.3 | 30 |
| FL120/30 | 1.6 | 28 |
| FL150/30 | 1.9 | 25 |
| FL180/30 | 2.2 | 23 |

**

※1 圧力損失が0.2kPaを超えない時の流量($xL \leq 0.2kPa$) **
各型式にマスク用エルボが1個付属する。*

2. 原理

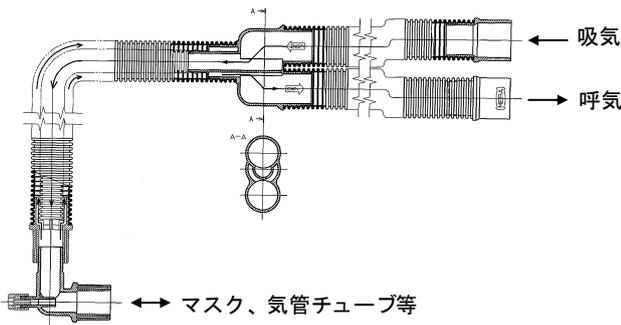

麻酔器から送気される吸気(空気又は酸素を含む医療ガス)は、吸気用蛇管からコアキシャルYピースに接続された吸気用内管を通して、患者へ送入される。患者から排出される呼気は、呼気用外管からコアキシャルYピースに接続された呼気用蛇管を通り装置へ戻される。

【使用目的、効能又は効果】

全身麻酔を施すための機器のうち、麻酔器用呼吸回路。

【品目仕様等】

1. 漏れ量は、内部ガス圧 60 ± 3 (hPa) において 50 (ml/min) 未満であること。 **

【操作方法又は使用方法等】

使用方法 **

1. 本品の吸気用蛇管のソケット(緑色)を麻酔器の吸気弁側に接続し、呼気側用蛇管のソケット(白色)を呼気弁側に接続する。
2. 患者コネクター(マスク用エルボ)は、外径22mm 内径15mmなので、そのままマスク又は気管チューブに接続する。

使用方法に関連する使用上の注意

蛇管を捻じらないこと。(マスク用エルボを除き、可動及び脱着しないため) *

【使用上の注意】

重要な基本的注意 *

1. 本品は目的用途以外には、使用しないこと。 *
2. 併用する(特に接続する)医療機器の添付文書等は、必ず読み、安全確認を行ってから使用すること。 *
3. 本品はコネクタ接続部の形状が JIS T 7201-2-1:1999 に適合した医療機器と接続して使用すること。 *
4. 本品を組立てるときに、アルコールや界面活性剤の液体を使用して取付けないこと。 [樹脂部品にひびを生ずることがある]
5. 本品を使用する前に、梱包が損傷を受けていたり、回路が損傷(亀裂・破損)・変色・変形している場合は使用しないこと。
6. 蛇管を極端に折り曲げないこと。
7. 内管を吸気側、外管を呼気側にして使用すること。 [逆に接続すると内管に呼気の水滴が溜まり雑音の発生、呼気抵抗の上昇の可能性がある。また、長時間使用すると、外管にも水滴が溜まる可能性がある] **
8. 本品を麻酔器等の装置に取り付けたときは、装置の取扱説明に従ってリーク試験を行い、安全確認を行うこと。 *

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水濡れ、ほこり、高温(50°C以上)、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所等は避けること。 *

有効期間・使用の期限

ラベルに記載されている製造年月から3年。
[自己認証(当社データ)による] **

【包装】

1セット/1袋、5袋/1箱に収納。 *

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名: フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011