



IOAJI025F

※2017年4月（第5版）（新記載要領に基づく改訂）
※2013年4月（第4版）

承認番号 22100BZX00952000

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012

PORTEX・呼吸回路

再使用禁止

【警告】

〈使用方法〉

- 1) Tコネクタの接続されていない部分が、大気開放あるいは吐出可能な状態になっていることを確認すること〔呼気を吐出できず、呼吸ができなくなるため〕。

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

001575 トラキTアダプタ



・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は呼吸回路接続時に用いるコネクタである。

【使用方法等】

1. 垂直方向内径15mmに気管切開又は気管内チューブの15mmコネクタを接続してください。
2. 内径22mmの蛇管を左右どちらか一方に接続してください。
3. 接続した蛇管は酸素吸入用ネブライザ等に接続して、吸入酸素濃度を調節してください。
4. Tピースの左右どちらか一方に内径22mmの蛇管を接続すると、部分的再呼吸用混合ガスを蓄積しておくことができます。

【使用上の注意】

〈その他の注意〉

- 1) 本品は、絶対に洗浄、滅菌、再使用しないこと〔交差感染の原因となったり、滅菌や洗浄剤溶液によって有害物質が残留する恐れがあるため〕。

【保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※※〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

※※〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国