

PORTEX・呼吸回路

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

002837 フレックスチューブ



フレックスチューブの長さ	約16.5cm（約6.5インチ）
死腔量	約36mL
重量	32g

・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

本品は呼吸回路使用時に用いるチューブである。

【使用方法等】

1. 本品と使用する器具（人工鼻、気管内チューブ、気管切開チューブ、手動式人工呼吸器、人工呼吸器用呼吸回路やフィルタ等）のコネクタと接続してください。
2. 接続後、リークがないことを確認してから使用してください。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) 使用前に本品を接続して、一回換気量測定によりリークがないことを確認すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 本品の死腔量を考慮して、患者の換気量を評価すること。
- 2) 使用する前にどの部分にもリークや閉塞が無いこと、異物が附着していないことを確認すること。

＊〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

1) その他の不具合

・チューブの閉塞、狭窄、潰れ、折れ、キンク、破損、リーク、変形

2) その他の有害事象

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が生じる可能性があるため、患者の状態を十分に観察し、異常の恐れが生じた場合は、直ちに適切な措置を施すこと。なお、以下は代表的な有害事象であり、すべてを列記するものではない。専門書・研究発表等も参考にすること。

・感染

・リーク、閉塞等による呼吸不全

〈その他の注意〉

- 1) 本品にオートクレーブ滅菌、乾熱滅菌等、材質に影響を及ぼす滅菌消毒はしないこと。

【保管方法及び使用期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊＊〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

＊＊〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国