

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 70306000

シリコン ソラシックカテーテル

再使用禁止

【警告】

- ・ 本品の側孔部は必ず完全に皮下に留置し、体表上に出さないこと。[吸引不良の原因になり治癒遅延や感染を引き起こすおそれがある。]
- ・ 本品に穴を追加する等の加工を施さないこと。
- ・ 皮膚等に固定する際、針や鋭利な器具でカテーテルを傷つけないこと。
- ・ 本品の留置の際は、カテーテル引き出し経路の周囲の気密性を確保するため、皮下及び筋層を這わせること。[皮下の這わせが不十分であると挿入部からのリーク及び感染の危険性がある。]
- ・ 固定の糸を過度に固く締めすぎないこと。[カテーテルを傷つけたり、狭窄、破断の原因になるため。]
- ・ 患者に複数のカテーテルを挿入している場合は、刺入部と接続部をたどって確認すること。[間違ったカテーテルへの接続を防ぐため。]
- ・ カテーテルを過度に曲げないこと。[キンクすると、挿入部からのリークや吸引不良の危険性がある。]
- ・ 血腫を形成させないために十分な吸引を行うこと。[治癒遅延や感染を引き起こすおそれがある。]
- ・ カテーテルの抜去は、必ず手でゆっくりと行うこと。[鉗子等の使用はカテーテルを破損するおそれがある。]
- ・ カテーテルを抜去した時に、本品に欠損がないことを確認すること。[体内に破片等が残留している可能性がないことを確認するため。]
- ・ 低圧持続吸引器具に接続するときは適切なコネクタを利用し、必要の場合はバンディングやテーピング等を加えリークがない事を確認すること。[吸引不良の原因になり治癒遅延や感染を引き起こすおそれがある。]
- ・ カテーテルが閉塞しない様、常に回路を観察すること。


【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止
- ・ 本品の包装に破損、汚損があるものは汚染されている危険性があるので使用しないこと。
- ・ 本品は気道・気管・腎ろう・膀胱ろう・尿路用カテーテルには適用しない。
- ・ 吸引圧は下記のとおり。
 ストレート：12Fr～28Fr は 80kPa 以下
 30Fr～33Fr は 66.7kPa 以下
 アングル：24Fr は 80kPa 以下
 28Fr～33Fr は 66.7kPa 以下

【形状・構造及び原理等】

1. 形状又は構造

< 構成部品 > シリコン ソラシックカテーテル

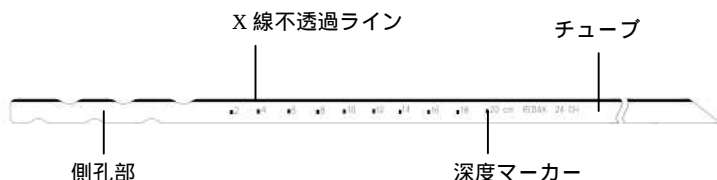

取扱説明書を必ずご参照下さい。

2. 種類

ストレートタイプとアングルタイプがある。（単位：mm）

サイズ 呼称 (Fr)	チューブ		
	長さ	内径	外径
ストレートタイプ			
12	500	2.60	4.20
15	500	3.30	5.40
18	500	3.70	6.00
21	500	4.20	6.70
24	500	5.30	8.20
28	500	6.20	9.40
30	500	6.80	10.00
33	500	7.40	10.70
アングルタイプ			
24	600	5.30	8.20
28	600	6.20	9.40
30	600	6.80	10.00
33	600	7.60	10.90

3. 作動原理

体内に挿入、留置し、側孔より体液又は気体を採取し、体外へ排出する。

【使用目的、効能又は効果】

体内に留置し、陰圧により、体内の液体又は気体を体外に排出する。

【品目仕様等】

準拠規格：JIS T 3215:2005

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用の準備

- (1) 本品の包装に破損、汚損があるものは汚染されている危険性があるので使用しないこと。
- (2) カテーテルを留置する前に、必要となる種類、部位及び適切なサイズを選択すること。
- (3) 無菌的操作により、カテーテルを包装より慎重に取り出すこと。
- (4) 適切な低圧持続吸引器具を用意すること。尚、使用前には必ず低圧持続吸引器具の添付文書を熟読すること。

2. 使用中

- (1) 切開創とは別の適切な位置に、予めカテーテル留置孔を造設する。
- (2) 遠位側を切開創より挿入し、予め造設したカテーテル留置孔から体外へ通過させるように挿入する。
- (3) 本品の留置の際は、カテーテル引き出し経路の周囲の気密性を確保するため、皮下及び筋層を這わせること。

- (4) 深度マーカーを利用し、適正な位置、長さにかテーテルを挿入し、クランプする。
- (5) 縫合、又はテーピングにより、カテーテルを固定する。縫合の場合、固定の糸を過度に固く締めすぎないこと。
- (6) 用意した低圧持続吸引器具と本品のコネクタ部を接続し、クランプを外して吸引を開始する。

3. 使用後

- (1) 使用後は必ず手でゆっくりと抜去すること。
- (2) 抜去後は、ドレナージしていた体表面の縫合及び創傷被覆材・保護材での創部保護等の適切な処置を行うこと。
- (3) 本品は単回使用製品であるため、使用後は直ちに廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・ 医師の指示の下で使用する。
- ・ 使用に先立ち本書を熟読し、その内容に従うこと。
- ・ 本品の仕様は予告なく変更する場合がある。仕様変更による誤操作を防ぐため、添付文書は必ず使用する製品に添付のものを参照すること。
- ・ 本品の包装に破損、汚損があるものは汚染されている危険性があるので使用しないこと。
- ・ 本品に傷、汚れ、潰れ、折れ等の異常があるものは使用しないこと。
- ・ 本品は1回限りの使用で再使用しないこと。また滅菌袋を開封した未使用の本品を再滅菌して使用しないこと。
- ・ 本品の製品ラベルにより、製品の種類、使用期限を確認すること。期限切れのものは使用しないこと。
- ・ 全ての構成部品が封入されていることを確認すること。
- ・ ドレーンチューブ挿入前に、導入部位を確認し適切なサイズを選択すること。
- ・ コネクタを使用する際は付属品を使用すること。
- ・ 本品は、厳格な無菌的操作の下で使用する。
- ・ ドレーンチューブを過度に曲げないこと。キンクすると、挿入部からのリークや吸引不良の危険性がある。
- ・ 留置中は本品の折れ、潰れ、ねじれ等のないことを適宜確認すること。ドレナージ不良となる可能性がある。
- ・ ドレーンチューブの留置期間は28日を限度とする。
- ・ ドレーンチューブを長期間留置した場合、抜去し難い場合があるので注意すること。
- ・ 手術創の排液が十分排出されずに血腫が形成されるおそれを回避するために、適切な吸引を行うこと。
- ・ 接続部からの漏出に注意すること。
- ・ ドレーンチューブを留置する際は、臓器及びドレーンチューブに過度の負担がかからないようにすること。
- ・ ドレーンチューブの破損や断裂を避けるため、下記の点に注意すること。
 - a. ドレーンチューブに縫合針を刺し通し、縫合しないこと。
 - b. 排液の流れが妨げられないように、刺入部から外のドレーンチューブをキンクさせないように固定すること。
 - c. ドレーンチューブを留置する際は、スムーズに抜去できる事を考慮して留置すること。
 - d. ドレーンチューブを抜去する際は、先の尖った鋭利な器具等の使用は避け、手でやさしく抜去すること。
- ・ 患者からの排液でドレーンチューブが閉塞していないか定期的に観察し、ミルキング等を行い閉塞がないようにすること。
- ・ ミルキングの際に、指やローラー鉗子などで過度にしごかないこと。過度にしごくと、チューブが傷つき破断したり、チューブ内腔がつぶれて吸引不能となる可能性がある。
- ・ 本品に関して不明な点は下記お問い合わせ先まで問い合わせること。

- ・ 使用後の本品は感染性廃棄物処理マニュアルに基づき適切に処理すること。
- ・ エアリークが発生した場合は、直ちにドレナージを中止し、リーク位置の確認とリークの防止処置を行うこと。また感染症を併発しない様、患者の様態に十分注意し、必要に応じた処置を施すこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光、高温多湿、殺菌灯等の紫外線及び水濡れを避け、室温にて保管すること。

2. 使用期限

包装に記載の使用期限を参照のこと。

【包装】

シリコン ソラシックカテーテル

10個/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売元】 泉工医科貿易株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-20-12

TEL 03-3836-9031

【製造元】

レダックス エスアールエル

REDAX S.r.l.

イタリア

【お問合せ先】

泉工医科工業株式会社 商品部

TEL 03-3812-3254

取扱説明書を必ずご参照下さい。