

機械器具（06）呼吸補助器  
管理医療機器 呼吸回路除菌用フィルタ 35070000

バクトキャッチャ

B C - L

再使用 禁止

【警告】

1．本品を他の製品と接続する場合は、接続に誤りがないこと、接続部が確実に接続されていること、無理な力が加わっていないこと、閉塞やガス漏れ等が生じていないことを、接続時に確認すること。[閉塞やリークにより、呼吸に障害が生じる可能性がある。]

2．本品を人工呼吸器に接続する場合は、本品の特性上、流量抵抗が変化する。取扱説明書に従い、人工呼吸器の低圧アラーム等を設定すること。[患者回路の接続が外れても、設定によってはアラームが発生しない場合がある。]

3．低流量麻酔の際には、結露に注意すること。[原理上、吸気側に水が溜まる可能性がある。]

4．本品に分泌物や結露した水が溜まった場合は、直ちに本品を新しいものと交換すること。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞の可能性がある。]

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

1．本品による気道抵抗の増加が許容できない患者には使用しないこと。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]

併用医療機器

1．本品をネブライザーと併用しないこと。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、換気が行えないおそれがある。]

使用方法

1．再使用禁止

2．再滅菌、洗浄、消毒禁止

3．有効期限の過ぎたものは使用しないこと。


4．24 時間を越えて使用しないこと。[本品に患者の分泌物等が蓄積することにより、流量抵抗の上昇、あるいは閉塞の可能性がある。]

5．患者口元で使用しないこと。[内容積が大きいため適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]＊

【形状・構造及び原理等】

1．各部の名称

本品はエチレンオキサイドガスによる滅菌品である。

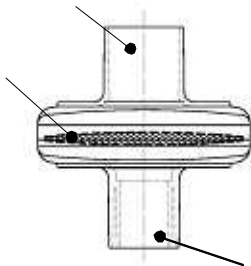

| 番号 | 部品名    |
|----|--------|
|    | 機械側ポート |
|    | 患者側ポート |
|    | 静電フィルタ |

図 1．各部の名称

2．種類と構成

| 型 式  | 種類 ＊ ＊                                                                             | 内容積 ＊ | 1 回換気量の範囲 | 重量    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| BC-L |  | 66mL  | 1500mL 以下 | 33.5g |

3．原理

人工呼吸器、麻酔システム（麻酔器）から患者へ供給される吸気、または患者から排出される呼気が本品を通過する際に、静電フィルタによりガス中の異物が除去される。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、呼吸システム及びガスサンプリングラインに用いて、微生物や細菌性病原体を捕捉し、呼吸システム及びガスサンプリングラインの汚染や別の患者への交差感染を防止する。

【品目仕様等】

1．ガス漏れ

本品に空気圧 7 ± 0.5kPa を加えた時のガス漏れ量は、10mL/分以下であること。

【操作方法又は使用方法等】

使用方法

1．滅菌袋を開封して本品を取り出す。

2．本品の患者側ポートに呼吸回路等を接続する。

3．本品の機械側ポートを人工呼吸器、又は麻酔システム（麻酔器）の吸気接続口、呼気接続口に接続する。

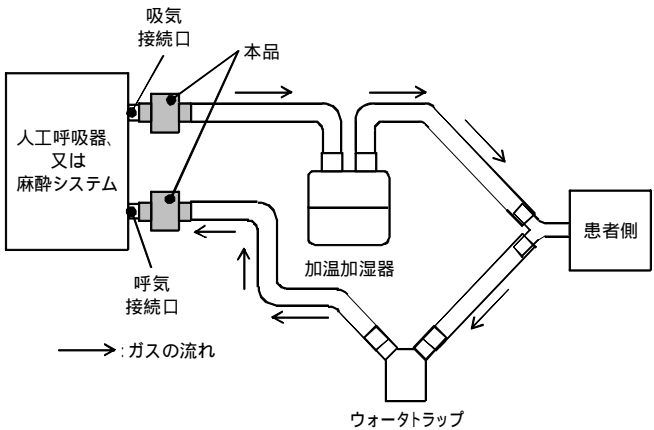


図 2．本品の取り付け図

- 使用方法に関連する使用上の注意
- 1．滅菌袋及び本品に亀裂、破損がある場合は、本品を使用しないこと。

2．本品のラベル表示（機械側 ↓）に従い、正しい向きに接続すること。

3．本品は呼吸管より高い位置で使用する。[結露した水分が

流れ込む場合がある。]

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は目的用途以外には、使用しないこと。\* \*
- (2) 医師の指示の下で使用すること。
- (3) 併用する（特に接続する）医療機器の添付文書等は、必ず読み、安全確認を行ってから使用すること。\* \*
- (4) 本品はコネクタ接続部の形状が JIS T 7201-2-1: 1999 に適合した医療機器と接続して使用すること。
- (5) 本品をアルコール等の有機溶媒で清拭しないこと。[ひび割れ等の危険がある。]
- (6) 使用中は患者の状態に十分に注意を払い、本品に無理な力が加わらないようにし、回路に異常が認められた場合は、ただちに回路を交換すること。
- (7) 本品使用後は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、院内で定められた手順等に従い適切に廃棄すること。
- (8) 可燃性ガスと併用しないこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

### 1. 貯蔵・保管方法

水漏れ、ほこり、高温（50℃以上）、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所等は避けること。

### 2. 有効期間・使用の期限\*

ラベルに記載されている滅菌日から3年。[自己認証（当社データ）による]

## 【包装】

1個 / 1滅菌袋に収納し、20滅菌袋 / 1包装箱に収納。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

### 製造販売業者

泉工医科工業株式会社  
埼玉県春日部市浜川戸2-11-1

### 製造業者

メラセンコー コーポレーション  
(MERASENKO CORPORATION)  
国名：フィリピン

### お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社  
商品企画 TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011