

再使用禁止

ワンタッチペンランセット

【警告】

- 1.採血部位に病原微生物が付着し感染の危険性があるため、採血部位を必ず消毒してください。また、採血後はばんそうこうなどで止血と保護を行ってください。
傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
- 2.使用後の穿刺針には血液が付着しています。病原微生物による感染を防ぐために、使用後は他人に触れないように廃棄してください。
- 3.穿刺針を穿刺器具に装着したまま放置しないでください。

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止。一度使用した穿刺針は必ず廃棄してください。
- 2.一度保護キャップをはずした穿刺針は、再度保護キャップを装着しないでください。
- 3.使用時にすでに保護キャップがはずれていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】

1.材質

針	: ステンレス鋼
保護キャップ	: ポリエチレン
ボディ	: ポリエチレン
ケース	: ポリスチレン

2.寸法

針の太さ	: 30G
------	-------

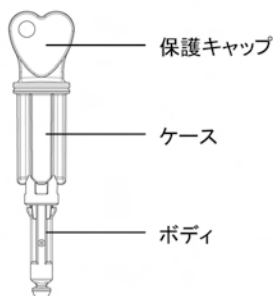

組み合わせ医療機器(別売)

販売名	: ワンタッチペン
医療機器届出番号	: 33B2X00002000003

【使用目的、効能又は効果】

本品は血糖値測定等のための微量採血を目的とします。放射線滅菌済みですのでそのまま直ちに使用できます。

【操作方法又は使用方法等】

- 1.穿刺器具は専用の穿刺器具(販売名:ワンタッチペン)を使用してください。
 - 2.穿刺針を穿刺器具に挿入してください。このとき穿刺器具の確認窓全体が黄色になるまでしっかりと差し込んでください。
 - 3.保護キャップをねじって取りはずしてから採血してください。
 - 4.使用後は、廃棄してください。
- ※詳細な使用方法は穿刺器具の添付文書を参照してください。

【使用上の注意】

- 1.本品はワンタッチペン専用の穿刺針ですので、それ以外の穿刺器具に装着して使用しないでください。
- 2.使用後は、廃棄用の容器に入れ廃棄してください。
- 3.小児の手の届かないところに保管してください。
- 4.使用期限内のものを使用してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1.貯蔵・保管方法
水濡れや、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- 2.使用期限
箱に記載しています。[自己認証(当社データ)による]

【包装】

25本/箱、30本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 **株式会社 旭ポリスライダー**
 〒719-3226 岡山県真庭市三崎 860-2
 TEL 0867-42-1171

製造元 **株式会社 旭ポリスライダー**

販売元 **ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社**

東京都千代田区西神田3丁目5番2号
 ワンタッチコールセンター
 0120-113-903(無料通話、24時間)

お問い合わせ先