

機械器具(06) 呼吸補助器
高度管理医療機器
持続的自動気道陽圧ユニット(37234000)
特定保守管理医療機器 **スリープメイトS9** の付属品
エアチューブ(スリム)

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図

- ・エアチューブ(スリム)



2. 構成

- ・エアチューブ(スリム)

3. 寸法

種類	寸法
スリム	全長:1800mm

4. 使用環境

以下のような環境に設置し使用すること。

- ・周囲温度 :5～35℃
- ・相対湿度 :10～95% (結露のないこと)
- ・気圧 :680～1060hPa

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

睡眠時無呼吸症候群およびその他の呼吸不全に対する呼吸補助

【使用方法等】

1. 使用前の操作

(1) 加湿器を使用する場合

- ① 本体を水平な場所に置く。
- ② 本体の電源が切れていることを確認する。
- ③ 本体に加湿器を取り付ける。
- ④ 水チャンバーを取り外し、給水口から水を入れ、最高水位まで給水する。
- ⑤ 水チャンバーを加湿器に戻し、カバーを閉める。
- ⑥ ACアダプタのDC電源プラグを本体後部に接続する。
- ⑦ ACアダプタの他端をACコンセントに差し込む。
- ⑧ 本品をエアチューブ接続口(加湿器)に接続する。
- ⑨ 人工呼吸器用マスク(以下マスクと記載)を本品の他端に接続する。

(2) 加湿器を使用しない場合

- ① ACアダプタのDC電源プラグを本体後部に接続する。
- ② ACアダプタの他端をACコンセントに差し込む。
- ③ 本品をエアチューブ接続口に接続する。
- ④ マスクを本品の他端に接続する。

2. 以降の操作は「スリープメイトS9」本体の操作に準ずる。

* 3. 併用医療機器

本品は、以下の医療機器にも使用できる。

販売名	承認番号
NIPネーザルV	22300BZX00433000
オートセットCS-A	22500BZX00364000
スリープメイト10	22700BZI00027000
レスメドAirCurve 10 CS-A TJ	22900BZI00028000

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 加湿器は、常に患者の身体よりも低く、平らな面に配置すること
[本体やエアチューブ等の内側に水が浸入する可能性がある]

【使用上の注意】

- 本品に寝具等が触れないようにすること。[通気口を塞いだり、ACアダプタを覆う可能性がある。]
- 可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素環境雰囲気下では、使用しないこと。[爆発および火災発生の危険がある。]
- 酸素には助燃性がある。喫煙中または直火のある場所では酸素を使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- * 詳細についてはスリープメイトS9または併用医療機器の取扱説明書を参照すること。

＜使用者による保守点検事項＞

(1) 毎日

- ① 本品を取り外し、次回使用時まで清潔で乾燥した場所に吊り下げておく。

(2) 毎週

- ① 本品を加湿器およびマスクから取り外す。
- ② むるま湯と中性洗剤で本品を洗う。
- ③ よくすすぎ、直射日光のあたらない場所に吊りして自然乾燥させる。

(3) 複数患者間においての使用

- 病院、クリニックおよびスリープラボ等の医療施設において、本品を複数患者間に使用する場合には、以下に例示する製造業者が推奨する方法、または、各医療施設にて定められた方法にて消毒すること。

- ** 尚、製造業者では下記の消毒条件における製品の耐久性を確認している。

方法	内容	耐久回数
薬液消毒	フタール0.55%液 12分	100回
熱湯消毒	75℃ 30分	100回

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

レスメド株式会社

TEL 03-5829-4410

製造業者:

- ** ResMed Pty Ltd/レスメド ピーティーワイ リミテッド(オーストラリア)



社内管理コード
P126X11230-06