

機械器具 12 理学診療用器具
管理医療機器：人体開口部用超音波プローブカバー（JMDNコード：70015000）

再使用禁止

プロカバー N

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー様症状の既往歴のある患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は天然ゴムラテックス製の経腔用プローブ専用のカバーです。
- ・本品の形状、構造及び寸法は下記の通りであり、形状及び構造は側面平行で先端は円筒形、着色剤は使用せず、寸法は①全長180～200mm、②厚さ 0.07 ± 0.02 mm、③胴部折幅 52.0 ± 3.0 mmである。

【使用目的又は効果】

- ・超音波プローブに装着し、体液等から保護するために用いること。（単回使用のものに限る。）

【使用方法等】

- ①本品を使用直前に包装内からキズを付けないように取り出してください。
- ②本品を表裏逆にならないようにプローブの先端にかぶせてください。（この際、表裏を間違えると装着できません。）
- ③本品をプローブに向かってゆっくり巻きほぐしながら、根元までかぶせてください。
- ④本品は完全に巻きほぐしてから使用してください。
- ⑤本品とプローブを一緒に握ったまま操作してください。
- ⑥本品は1個につき1回限りの使用で、再使用はしないでください。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①この製品は、天然ゴムラテックスを素材にしています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- ②天然ゴムと接触する機会の多い方は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に際しては十分注意をしてください。

2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用は1個につき1回限りです。その都度、新しいものを使用してください。
- ②包装が破損していたり、汚染していた場合には、使用しないでください。
- ③包装を開封しましたら直ぐにご使用ください。
- ④製品が若干巻きほぐしにくい場合がありますので、その際は、爪やプローブなどで製品にキズを付けないように丁寧に巻きほぐしてください。
- ⑤医療機関等においての紫外線等の殺菌については製品の品質に影響がありますのでおやめください。
- ⑥刃物等、鋭利な器具等に触れると破れたり、穴があくことがありますので、ご注意ください。

3. 相互作用

- ・薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ①水分に接することを避け、また、直射日光・紫外線・オゾン・高温・多湿を避けて保管してください。
- ②防虫剤等の揮発性物質と一緒に保管しないでください。
- ③医療機関等使用現場においての殺菌行為はおやめください。
- ④購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。

2. 使用期間

- ・表示されている保管条件にて、製造日より2年とする。（外箱の使用期限欄に記載してあります。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ジェクス株式会社 大阪府大阪市中央区谷町2丁目3番12号
●ジェクスお客様相談室 ☎06-6942-4416（土・日・祝日を除く9:30～17:00）

【販売業者の氏名又は名称及び住所】

一般社団法人 日本家族計画協会 東京都新宿区市谷田町1丁目10

この添付文書及び外箱の表示を必ずお読みください。