

ピンニックス ライト

再使用禁止

【警告】

1. 感染の危険性があるため、採血前に穿刺部位の消毒を必ず行ってください。
2. 採血後は必ずばんそうこうなどで止血してください。
3. 傷口が治りにくいときは、こまめに消毒してください。
4. 使用後の採血針には触れないでください。[感染の危険性があります。]使用後は、速やかに廃棄してください。
5. 包装(密封体)を開封後に、そのままの状態では置かないでください。[針が誤って発射される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。使用後は必ず廃棄してください。毎回、新しい物を使用してください。
2. 使用前に包装(密封体)が開いていたり、破損するなど密封が破れている場合は使用しないでください。[密封包装されている限り無菌が保たれています。]
3. 分解、改造などや、採血以外の目的で使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は血液検査等の際に指先等を傷つけ、少量の血液を容易に採取するために使用するディスプレイ型採血器具です。採血針とバネが内蔵されたケースからなる発射器から構成されています。発射器全体は密封包装され、滅菌されています。

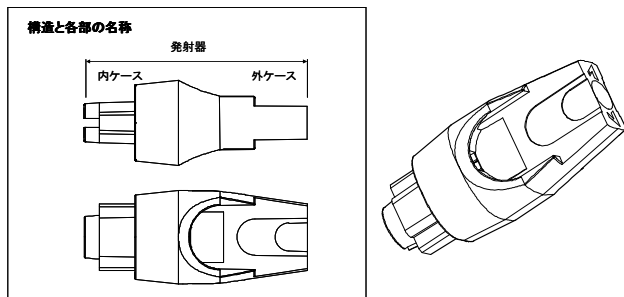

針の寸法:

- ・横幅 0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm
- ※ 針の材質:ポリ乳酸

2. 原理

包装(密封体)から本品を取り出し、穿刺部位に内ケースの先端部分をあて、外ケースを押し付けると、ケース内部のバネが収縮・伸長し、ケースに格納された穿刺針(採血針)が前方に押し出され、皮膚を穿刺します。

使用後、針の先端はケースの内部に戻ります。内ケースと外ケースが固定され、再使用は出来なくなります。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、血液検査のために少量の血液を指先等から採取する穿刺器具です。本品は、器具の内部に採血用の針と発射器を備えており、本品だけですぐに使用できます。

穿刺の直後、採血針が穿刺器具内に自動的に格納されるため、使用の後は安全かつ衛生的に廃棄できます。

【品目仕様等】

- ・自動ランセットの設計:針は、針基から刃先までの長さ又は保護容器から飛び出す針の有効寸法(皮膚に入る最大寸法)4.5mm以下となる構造又は機構を有すること。(JIS T 3257の5.4)

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- ① 本品を包装(密封体)から取出します。
- ② 穿刺部位を消毒綿で拭いて消毒し、乾燥させて下さい。
- ③ 穿刺部位として、指先の両側が推奨されています。
- ④ 外ケースを持ち、穿刺部位に内ケースの先端をあてて押しこみます。カチッという音とともに採血針の刃先が一瞬飛び出し、穿刺直後にケースに戻ります。
※注意:発射音があるまで押込みます[穿刺できないおそれがあります]
- ⑤ 刺し傷から血液を採取して下さい。
傷をガーゼやばんそうこうなどで止血してください。
- ⑥ 穿刺器具を速やかに廃棄容器に廃棄してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行なう場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないでください。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあります。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討してください。]
- 新生児または乳幼児から採血する時は、採血部位にかかとの左右側面の肉厚部分から採血してください。
- 採血操作の指導は、手技に熟練した医療スタッフが行ってください。
- 包装(密封体)の開封後、すぐに使用してください。
- 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 使用期限を過ぎたランセットは使用しないでください。
- 本品に過剰な力を加えないでください。[破損のおそれがあります。]
- 本品の針先は非常に鋭利で危険です。取り扱いには十分注意し、お子様および動物の手の届かないところに保管してください。
- 誤飲の恐れがあります。万一飲み込んだ時はすぐに医師へご相談下さい。
- 使用済みのランセットは、医療廃棄物として適切な廃棄処理を行なってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 室温にて、水ぬれ、直射日光、高温多湿及び化学物質に汚染される可能性のある場所を避けて保管してください。

2. 使用期限

- 使用期限は外装に記載してあります。
当社データによる自己認証

【包装】

100本入/袋

【製造販売元及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

- * 製造販売元:株式会社ライトニックス
西宮市甲東園2丁目2-6 〒662-0812
電話番号:0798-52-3594
- * 製造業者 :株式会社ヤマガタファステム

