

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

ニプロランセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、穿刺用針（ムク針）、針基、保護キャップ（ネジ切りキャップ）を一体成形した穿刺針である。



【使用目的、効能又は効果】

血液検査のため、少量の血液検体を指先、耳朶等の血管から採取すること。

【品目仕様等】

- 引き抜き強さ

本品の穿刺用針と針基の接合強度は以下のとおり。

穿刺用針の外径 (mm)	力 (N)
0.2以上0.5未満	8
0.5以上0.8未満	15

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品を専用の穿刺器具のランセット装着部に装着します。
[注意] 装着は確実に奥まで差し込んでください。
2. 保護キャップをねじ切り、穿刺用針をむき出します。
[注意] ねじ切ったキャップは廃棄の際に使用しますので捨てないでください。
3. 穿刺後、穿刺器具の穿刺キャップを取り、誤刺に注意しながら使用後の本品の穿刺用針に保護キャップを被せてから廃棄します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗うこと。
- 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがある。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告がある。]
- 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがある。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害

- 取り付けて使用する穿刺器具の添付文書・取扱説明書を参照のこと。
- 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがある。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討すること。]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
包装箱の使用期限を参照のこと。（自己認証による。）

【包装】

25、30本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号：06-6372-2331（代表）

フリーダイヤル：0120-834-226（電話番号をよくお確かめの
上、おかけ頂きますようお願い致します。）
9:00～17:30（土・日・祝祭日をのぞく）

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社