



【IS-37】

2016 年 4 月（第 1 版）

医療機器認証番号：223AFBZX00034000

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用人工呼吸器呼吸回路（JMDN コード 37706000）

インターサージカル単回使用コネクタ S

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 本品を接続する際に、本品及び接続した他の呼吸回路構成
品に閉塞や漏れが生じないことを確認すること。
2. 使用中は、接続した呼吸回路全域において閉塞や漏れが生
じることのないよう常に監視すること。


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用しないこと。[本品は単回使用のため]
2. コネクタ内側に内筒があるものには接続しないこと。
[回路が閉塞する可能性があるため]
3. 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質
上の不具合が生じる可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

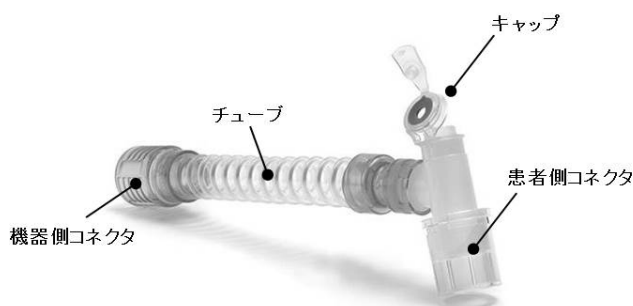

本品の機器側コネクタは 22F で人工呼吸器呼吸回路等に接続する。

品番	患者側コネクタ	回路長
5120000S	22M/15F スウィベル	0.16m
5180000S	9.5mm ポート 及び	0.20m
5250000S	シールアラウンドキャップ付き	0.27m

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

人工呼吸器又は麻酔器から患者への空気又は酸素を含むガスの
送込に用いること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用

- (1) 患者側コネクタと機器側コネクタをそれぞれ相手方に接
続し、ガスラインを構成する。このとき、本品が構成する
ガスライン全体で、閉塞又はリーク（漏れ）などを起こさな
いことを必ず確認すること。
- (2) 使用中は、本品を接続したガスライン全体において閉塞又
はリーク（漏れ）などの異常が起きていないことを確認す
ること。万一異常が起きた場合には、直ちに使用を中止す
ること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- (2) コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、
適度な力で接続すること。
- (3) 使用中は常に患者の状態及び本品の観察を行い、異常が無
いことを確認すること。
- (4) 使用中、呼吸回路内に溜まった水分が逆流しないように、
呼吸回路構成部品全体の配置に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこり
が発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所での
保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように
配慮すること。

＜有効期間＞

5 年間 [自己認証による]
個別包装に記載。

＜使用期間＞

7 日間 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社

電話番号：06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited