



I0AEI007B

*2013年4月1日（第2版）
2012年2月9日（第1版）

認証番号 224AIBZX00007000

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ 70569000（酸素投与キット 12855000）

ポーテックス・O2チューブ

再使用禁止

【警告】

〈使用方法〉

- ・医師もしくは医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが本品を使用すること。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止


〈使用方法〉

- ・本品を高温、裸火、又は他の発火源の近くで使用しないこと [酸素は支燃ガスであるため]。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

100/575/022 ポーテックスO2チューブ

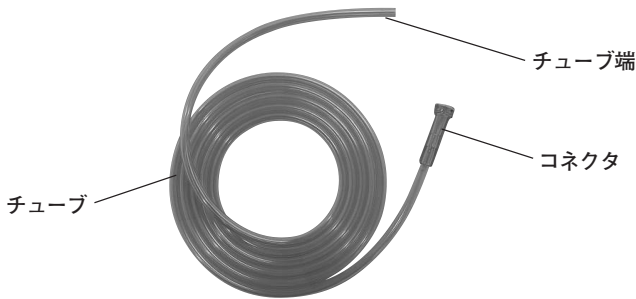

全長：2m

チューブ内径/外径：4mm/6mm

本品は医療ガス供給用のチューブである。ガス供給源と呼吸回路等に接続して用いる。

〈原理〉

本品は、ガス供給源と呼吸回路等に接続することで、患者に酸素ガス又は麻酔ガス等を供給する。

〈原材料〉

ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジイソノニルを使用しています）

- ・未滅菌

【使用目的、効能又は効果】

〈使用目的〉

本品は、呼吸回路等に接続し、患者に酸素ガス又は麻酔ガス等を供給するために用いる。

【品目仕様等】

〈品目仕様〉

引っぱり試験：	コネクタを固定し、チューブを軸方向へ30±1.5Nの力で15±1分間引っぱり張るとき、チューブとコネクタの接続部分が外れないこと。
---------	---

【操作方法又は使用方法等】

〈使用方法〉

1. 本品のコネクタをガス供給源に接続します。
2. 本品のチューブ端を呼吸回路（気管切開患者用人工鼻等）に接続します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・開封前に包装状態をよく点検し、破損、汚染、水濡れ等のあるものは使用しないこと。
- ・開封後、本品に外観上異常がないことを確認し、異常のあるものは使用しないこと。
- ・使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないこと、適切な酸素流量が投与されていること、本品とガス供給源との接続が確実であることを絶えず確認すること。
- ・本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジイソノニルが溶出する恐れがあるので注意すること。
- ・本品を使用した酸素吸入管理中は、火気を近づけないこと [引火する恐れがあるため]。

〈その他の注意〉

- ・院内の感染防止の指針に従うこと。
- ・関係法令を遵守し、適切に廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

- ・本品を保管するときは次の事項に注意すること。
- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間・使用の期限〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること。

【包装】

20個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1

*〈問合せ先〉

TEL (03) 3405-9300

〈製造業者〉

ゲイルメッド コーポレーション

GaleMed Corporation

〈国名〉

中華人民共和国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	再使用禁止
	添付文書参照
	未滅菌
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量