



【IS-90】

2016年4月(第1版)

医療機器認証番号: 225AFBZX00120000

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 麻酔回路セット (JMDN コード 70567000)

インターサージカル麻酔回路セット (2013000 タイプ)

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

1. 本品を接続する際に、本品及び接続した他の呼吸回路構成
品に閉塞や漏れが生じないことを確認すること。
2. 使用中は、接続した呼吸回路全域において閉塞や漏れが生
じることはないよう常に監視すること。


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用しないこと。[本品は単回使用のため]
2. コネクタ内側に内筒があるものには接続しないこと。[回
路が閉塞する可能性があるため]
3. 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質
上の不具合が生じる可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

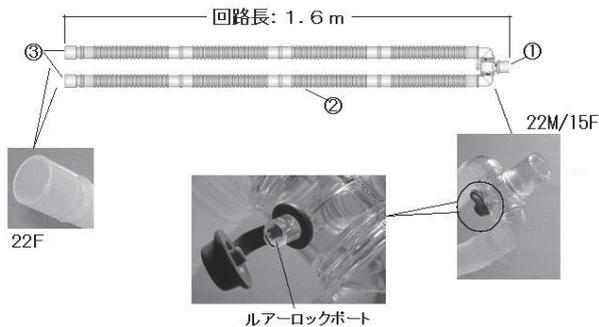

④付属品:



番号	名称	機能
①	患者側コネクタ	22M/15F となっている患者接続口。ス ウィベル(コネクタ部分が回転でき る)タイプ。また、圧力測定などを可 能とする外径約 6mm のルアーロック ポートを備えている。
②	呼吸管	中空でガスを通過させるチューブ。
③	機器側コネクタ	22F となっている麻酔器接続口。
④	付属品	22M-22M コネクタ: 22M となっている コネクタ。

＜作動・動作原理＞

麻酔器等に接続し、患者に麻酔ガス等を送気する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用

- (1) 患者側コネクタについているセーフティキャップを外す。
- (2) 機器側コネクタを本品と接続する麻酔器に接続する。
- (3) 患者側コネクタを本品と接続する医療機器に接続する。こ
のとき、本品が構成するガスライン全体で、閉塞又はリー
ク(漏れ)などを起こさないことを必ず確認すること。
- (4) 使用中は、接続した麻酔器の監視装置などにより、本品が
構成するガスライン全体において閉塞又はリーク(漏れ)
などの異常が起きていないことを確認すること。万一異常
が起きた場合には、直ちに使用を中止すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- (2) コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、
適度な力で接続すること。
- (3) 使用中は常に患者の状態及び本品の観察を行い、異常が無
いことを確認すること。
- (4) 使用中、呼吸回路内に溜まった水分が逆流しないように、
呼吸回路構成部品全体の配置に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこり
が発生する場所、空气中に塩分やイオン分を含む場所での
保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように
配慮すること。

＜有効期間＞

個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

日本メディカルネクス株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited