



【IS-90】

\* 2017年8月(第2版)(新記載要領に基づく改訂)  
2016年4月(第1版)

医療機器認証番号: 225AFBZX00120000

機械器具6 呼吸補助器  
管理医療機器 麻酔回路セット (JMDNコード 70567000)

## インターサージカル麻酔回路セット (2013000タイプ)

### 再使用禁止

#### \*【警告】

##### ＜使用方法＞

1. 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、供給ガスの吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
2. 使用中は患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]


#### \*【禁忌・禁止】

##### ＜使用方法＞


1. 再使用禁止
2. 火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは本品を使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]

#### 【形状・構造及び原理等】

##### ＜形状＞

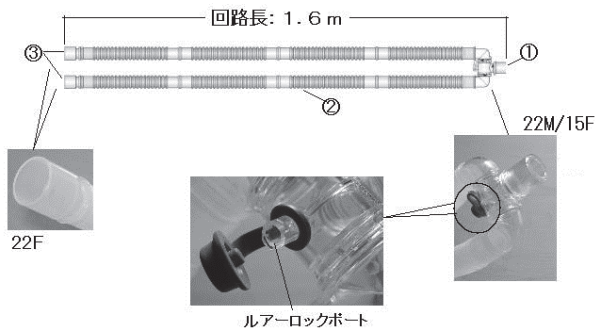

##### ④付属品:

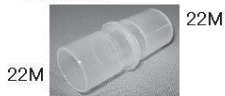

番号	名称	機能
①	患者側コネクタ	22M/15Fとなっている患者接続口。スウィベル(コネクタ部分が回転できる)タイプ。また、圧力測定などを可能とする外径約6mmのルアーロックポートを備えている。
②	呼吸管	中空でガスを通過させるチューブ。
③	機器側コネクタ	22Fとなっている麻酔器接続口。
④	付属品	22M-22Mコネクタ: 22Mとなっているコネクタ。

##### ＜作動・動作原理＞

麻酔器等に接続し、患者に麻酔ガス等を送気する。

#### 【使用目的又は効果】

##### ＜使用目的＞

麻酔器等に接続し、麻酔中の呼吸管理に用いること。

#### 【使用方法等】

##### ＜使用方法＞

1. 患者側コネクタについているセフティキャップを外す。
2. 機械側コネクタを本品と接続する麻酔器に接続する。
3. 患者側コネクタを本品と接続する医療機器に接続する。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- \* (1) 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があるため]
- (2) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- \* (3) 本品に過度な負荷をかけないこと。[本品の破損等により品質上の不具合が生じる可能性があるため]
- (4) コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力で接続すること。
- (5) 使用中、麻酔回路内に溜まった水分が逆流しないように、麻酔回路構成部品全体の配置に気をつけること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

##### \* <有効期間>

本品のラベルの使用期限を参照すること。

##### \* <使用期間>

7日間 [自己認証(当社データ)による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 製造販売元

日本メディカルネクスト株式会社  
電話番号: 06-6222-6606

##### 製造元

インターサージカル社(英国)  
Intersurgical Limited