

JMS 予防接種用針埋込型シリンジ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、外筒、押子、ガスケットからなり、外筒先端に注射針を接着した針埋込タイプである。

<構成>

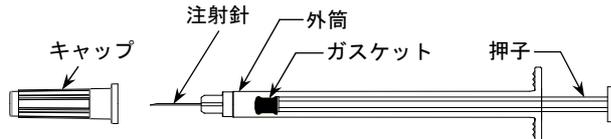

- ・針管にはステンレス鋼を使用している。
- ・本品の内面にはシリコンオイルを塗布している。

【使用目的、効能又は効果】

本品は、注射用医薬品を注入するための針付注射筒である。

【品目仕様等】

1. デッドスペース：0.01mLを超えない。
2. 針の漏れ：注射筒と針管の接合部から、液漏れ又は連続した気泡が形成されない。
3. ガスケットを通した液及び空気の漏れ：ガスケットのシールを通して水の漏れがない。
4. 針管引抜強さ：外筒と針管との接続強度は22N以上である。
5. 針管弾性：針管を8度曲げて1分間保った後、元の位置に復元する。
6. 針管曲げ強さ：針管を5mmの曲率半径で90度曲げた時、折れない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 必要に応じて、手袋を着用します。
2. 本品を包装から取出します。
3. 穿刺部位を消毒します。
4. 押子を押し、外筒内部から空気を完全に押し出します。
5. キャップを外し、薬液を吸引します。
6. 穿刺部位に穿刺して注射を行います。
7. 針を抜去後、必要な場合は、止血を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 薬液を吸引する際は、針先が液面から出ないように注意すること。[注射筒内にエアが混入する。]
- 押子を引く際は次の事項を順守すること。
 - (1) 外筒印刷部の目盛を越えて押子を引かないこと。[押子が外筒から抜け、液漏れが生じる可能性がある。]
 - (2) 押子をまっすぐゆっくり引くこと。[強く引く、ねじりながら引いた場合は、外筒との密着性が低下し、液漏れやガスケットの外れが生じる可能性がある。]
- 外筒印刷部については次の事項を順守すること。
 - (1) 目盛を強くこすらないこと。[目盛が消える可能性がある。]
 - (2) 薬液等が付着した状態で放置しないこと。[目盛が剥離する可能性がある。]
- キャップを外す際は、針先がキャップに接触しないように注意すること。[針先を傷める可能性がある。]
- バイアルや薬液容器等のゴム栓に刺通する際は次の事項を順守すること。

- (1) 本品を斜めに刺通したり、刺通中に横方向への力を加えたりしないこと。[注射針の変形や破損が生じる可能性がある。]
 - (2) ゴム栓への刺通はゆっくり、まっすぐ行い、同一箇所を繰り返し刺通しないこと。[刺通部分を削り、針管内に詰まりが生じる、又はゴム片等が混入する可能性がある。]
- アンプル等の容器壁面に針管を接触させないように注意すること。[針先が傷み、刺しづらくなる可能性がある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 包装が破損及び汚損している場合や、製品に破損及び変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
 - 包装を開封したらすぐに使用すること。
 - 使用中は破損、薬液漏れ等について確認すること。
 - 併用する医薬品の添付文書を確認後、使用すること。
 - 薬液を針管に長時間接触させないこと。[薬液が結晶化し、針管に詰まりが生じる可能性がある。]
 - 本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
 - 冷蔵保存等低温下での取扱いに注意すること。[低温下では、本品の耐衝撃性が低下する。]
 - 接液部を汚染させないこと。
 - 本品に、過度に圧迫、曲げるような負荷を加えないこと。[キャップが外れ、注射針が損傷する可能性及びガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気の混入が生じる可能性がある。]
 - リキャップする必要がある場合は、誤刺を防止するため、保護具を使用するか、キャップを手で持たずに台等に置いて、キャップをまっすぐに被せること。[傾けると、針がキャップを突き抜ける可能性がある。]
 - 押子を繰り返し前後させる等の操作を行う際は、押子を汚染させないように、清潔な手袋を着用する等、十分注意して操作すること。[押子を經由して外筒内が細菌汚染する可能性がある。]
2. その他の注意
- 誤刺に注意すること。
 - 針部には直接手を触れないこと。
 - 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 使用期限
- 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証(当社データ)により設定]

【包装】

100本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号
郵便番号：730-8652
電話番号：082-243-5806