

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012

メラブリージングコネクタ

再使用禁止

【警告】

1. 本品を他の呼吸管理器具(呼吸回路など)と接続する場合は確実に接続されていること(リーク、閉塞、接続が緩いなどの問題がないこと)を確認し、使用中も十分な管理、観察を行うこと。[接続が不完全な場合、呼吸困難などを引き起こすことがあるため]


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 滅菌・洗浄禁止
3. 酸素を使用している場合は、周囲で火気およびスパークの発生する可能性のある物を使用しないこと。[発火・爆発を誘発する可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

形状

・エルボコネクタ (15M, 15F/22M)

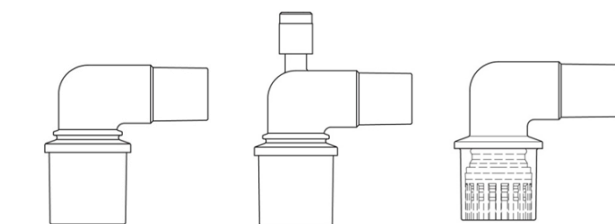


エルボコネクタ

エルボコネクタ
(ポート付)エルボコネクタ
(ギアードスイベル)

種類	型式	死腔
エルボコネクタ	エルボコネクタ	約 10ml
	エルボコネクタ(ポート付)	
	エルボコネクタ(ギアードスイベル)	

・T アダプタ (22M, φ15, 22M)

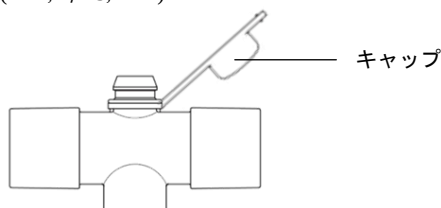

種類	型式
T アダプタ	気管切開用 T アダプタ

作動・動作原理

他の医療機器同士を連結することが出来る。

【使用目的、効能又は効果】

呼吸回路の連結などを目的として使用する。

【品目仕様等】

コネクタ部は JIS T 7201-2-1: 1999 に適合する。

【操作方法又は使用方法等】

接続しようとする呼吸回路部品に対して、本品のうち適当な形状を選択する。接続部が緩まないように確実に接続する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品は目的用途以外には使用しないこと。
2. 本品のコネクタ部には、指定されたテーパ接合以外の製品を使用しないこと。
3. 本品に破損などの異常がある場合は使用しないこと。
4. 水や薬液(アルコール、界面活性剤など)で濡らして使用しないこと。
5. 包装袋から本品を取り出したときは、本品の外観に異常がないことを確認してから使用すること。
6. 本品の分解・改造はしないこと。
7. 院外で本品を使用するとき、医師は専門の従事者に安全な使用方法を説明すること。
8. 本品使用後の廃棄は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」などに従い適切に処理すること。
9. 本品は未滅菌のため、清潔野で使用しないこと。

相互作用

1. 併用する医療機器の添付文書は必ず読み、安全確認を行ってから使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水漏れ、ほこり、高温(50℃以上)、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所などは避けること。

有効期間・使用の期限

包装箱に記載。[自己認証(当社データ)による]

【包装】

エルボコネクタ

- ・1 個 /1 袋に収納し、10 袋 /1 箱に収納。

T アダプタ

- ・1 個 /1 袋に収納し、5 袋 /1 箱に収納。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名: フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL: 03-3812-3254 FAX: 03-3815-7011