

機械器具(05) 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
 管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000
 (単回使用人工呼吸器呼吸回路 37706000)
 (単回使用呼吸回路用コネクタ 34838012)

セレクトY呼吸回路

Y A R

再使用禁止

【警告】

1. 本品を他の製品と接続する場合は、接続に誤りがないこと、接続部が確実に接続されていること、無理な力が加わっていないこと、閉塞やガス漏れ等が生じていないことを、接続時に確認し、使用中も十分な管理、観察を行うこと。[閉塞やリークにより、呼吸に障害が生じる可能性がある。]

【禁忌・禁止】


使用方法

1. 滅菌、洗浄禁止
2. 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

(1) 接続した状態*

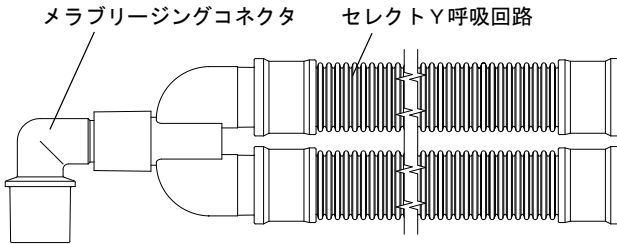

(2) セレクトY呼吸回路(未滅菌)* Y A R

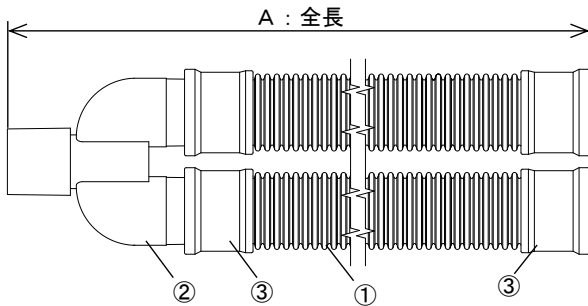

番号	部品名
①	呼吸管大
②	パラレルYピース大R
③	22mmメスコネクタ大

2. 種類と構成*

型式	全長(m) 図1のA部寸法
YAR-90-X	0.9
YAR-120-X	1.2
YAR-150-X	1.5
YAR-200-X	2.0
YAR-300-X	3.0
YAR-500-X	5.0

型式の「X」にメラブリージングコネクタの種類(G:エルボコネクタ(ギアードスイベル)、又はS:エルボコネクタ(ポート付)、又はN:エルボコネクタ))が入る。

3. 原理

麻酔システム(麻酔器)、又は人工呼吸器から、吸気管とメラブリージングコネクタを通して、患者へ空気又は酸素を含む医療ガスを送入する。患者から排出される呼気はメラブリージングコネクタと呼気管を通り装置へ戻される。

【使用目的、効能又は効果】

セレクトY呼吸回路は、麻酔器又は人工呼吸器から患者への空気又は酸素を含むガスの送入に用いる。メラブリージングコネクタは、利便性のため気管チューブ、フェースマスクとセレクトY呼吸回路の平行Yピースを接続するために用いる。

【品目仕様等】

漏れ

内圧 6 ± 0.3 kPa (60hPa \pm 3hPa)でのガス漏れ量は毎分50mL未満

【操作方法又は使用方法等】

使用方法

- 本品(未滅菌)は、単回使用製品であるので、再使用しないこと。
1. 呼吸管の22mmメスコネクタ大を麻酔器、又は人工呼吸器の吸気接続口、呼気接続口にしっかりと接続する。*
 2. パラレルYピース大Rの患者側端へ必要に応じて付属のメラブリージングコネクタを接続する。*
 3. 併用する装置の添付文書等に従って漏れを確認する。

使用方法に関連する使用上の注意

1. 本品の包装に破れ、汚れ等の異常がある場合は、使用しないこと。
2. 本品に亀裂、破損がある場合は、本品を使用しないこと。
3. 使用前に閉塞、捻れ及びキックがないことを確認すること。
4. Y A Rを使用する場合、使用前にパラレルYピース大Rと呼吸管大がしっかりと接続されていることを確認すること。
5. 本品は、蛇管ホルダー等を用いて固定し、荷重が掛からないようにすること。[接続部の外れ、漏れ等を誘発する可能性がある。]
6. 呼吸管を極端に捻らないこと、または折り曲げないこと。
7. 患者の体位を変更した場合は、本品を適切な位置に変更すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品は目的用途以外には、使用しないこと。
2. 医師の指示の下で使用すること。
3. 併用する(特に接続する)医療機器の添付文書等は、必ず読み、安全確認を行ってから使用すること。
4. 本品はコネクタ接続部の形状がJIS T 7201-2-1:1999に適合した医療機器と接続して使用すること。
5. 本品をアルコール等の有機溶媒で清拭しないこと。[ひび割れ等の危険がある。]
6. 使用中は患者の状態に十分に注意を払い、本品に無理な力が加わらないようにし、回路に異常が認められた場合は、ただちに回路を交換すること。

7. 結露した水が溜まった場合は、直ちに本品を新しいものと交換すること。[通気抵抗の上昇の可能性がある。]
8. 本品は未滅菌のため、清潔野で使用しないこと。
9. 本品使用後は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、院内で定められた手順等に従い適切に廃棄すること。
10. 可燃性ガスと併用しないこと。
11. 本品を改造しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水濡れ、ほこり、高温（50℃以上）、多湿、直射日光にあたる場所、振動の激しい場所、凍結する場所等は避けること。

有効期間・使用の期限

包装箱に記載。[自己認証（当社データ）による]

【包装】*

- 全長 0.9m～2.0m：1個／1袋、5袋／1箱に収納
全長 3.0、5.0m：1個／1袋、2袋／1箱に収納

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

製造業者

メラセンコー コーポレーション
(MERASENKO CORPORATION)
国名：フィリピン

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011