

酸素供給用チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈使用方法〉

- 1) 本品を高温、裸火、又は他の発火源の近くで使用しないこと [酸素は可燃ガスであるため]。

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

001203 酸素供給用チューブ



〈原理〉

本品は、ガス供給源と呼吸回路等に接続することで、患者に酸素ガス等を供給する。

〈原材料〉ポリ塩化ビニル

- ・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

呼吸回路等に酸素ガス等を供給するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品の一方の端を酸素ガス供給源接続口に、他端を酸素投与機器に接続してください。
2. 処方どおりに流量を調節してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 使用前にどの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないこと、異物が付着していないこと、適切な酸素流量が投与されていること、本品と酸素供給源との接続が確実であることを絶えず確認すること。
- 2) 本品を使用した酸素吸入管理中は、火気を近づけないこと [引火する恐れがあるため]。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際し、以下のような不具合が発生する可能性がある。

- 1) その他の不具合

* 酸素チューブコネクタの外れ

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

http://www.smiths-medical.com/jp/

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	再使用禁止
	注意
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	未滅菌
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量