

経鼻酸素カニューレ

再使用禁止

【警告】

〈使用方法〉

- 1) 使用前に、カニューレ及びチューブに閉塞がないこと、又使用中は、どの部分にもリークや閉塞、よじれ及びキンクがないことを絶えず確認すること [酸素の供給が妨げられるため]。

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈適用対象（患者）〉

- 1) 鼻閉（鼻ポリープ、鼻粘膜浮腫等）の場合は本品を使用しないこと [口呼吸になると酸素吸入の効果がなくなるため]。


〈使用方法〉

- 1) 本品を高温、裸火又は他の発火源の近くで使用しないこと [酸素は可燃性ガスであるため]。


【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

001261 酸素カニューレ・乳幼児用

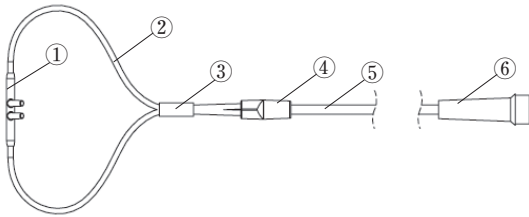

001289 酸素カニューレ・成人用

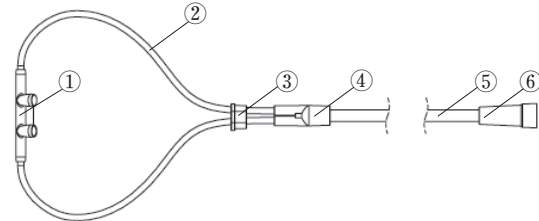

〈構成〉

No.	名 称
①	プロング
②	カニューレ
③	スライディングスリーブ
④	3ウェイコネクタ
⑤	酸素チューブ
⑥	酸素チューブコネクタ

〈原材料〉

No.	名 称	原 材 料
①	プロング	ポリ塩化ビニル
②	カニューレ	ポリ塩化ビニル

・未滅菌

100%酸素流量と吸入酸素濃度の早見表

酸素流量	1L/分	2L/分	3L/分
吸入酸素濃度	24~28%	27~31%	29~40%

【注意】 上表は通常呼吸時の値で、あくまで目安です。吸入するガスにはチューブから流れ出る酸素と周囲の空気が含まれます。また、吸入酸素濃度は患者の呼吸状態に依存して著しく変化し、安定しません。

〈原理〉

本品は、酸素供給源に接続し、患者の鼻孔に設置されたプロングを介して患者に酸素を供給する。

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

経鼻的に酸素ガスを投与するために用いる。

【使用方法等】

1. 酸素チューブコネクタを酸素供給源に接続してください。
2. 処方通りに流量を調節してください。
3. カニューレの先端（プロング）を患者の鼻孔に挿入してください。
4. カニューレが両耳の上を通り、あごの下にくるようにしてください。
5. スライディングスリーブをずらして、カニューレの長さを患者に合うように調節してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 必要に応じて、カニューレのプロングが鼻孔から外れないようにカニューレチューブを患者の頬にテープで固定すること。また、鼻下部、耳上部の圧が加わる部分をチェックし、ガーゼを当てる等すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際し、以下のような不具合が発生する可能性がある。

- 1) その他の不具合

* ・酸素チューブコネクタの外れ

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること [自己認証（当社データ）による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

*〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	再使用禁止
	注意
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	未滅菌
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可
	数量